

glue-u  
adhesives

---

**KATALOG**

Glue-U Adhesives ist ein niederländisches Unternehmen die innovative Produkte für Hufschmiede und Pferde produziert seit 2006. Nach unserer Philosophie "*zusammen passen wir auf dein Pferd auf*", haben wir speziell entworfen Klebstoffe zum Kleben jeder Art von Hufeisen, Säure freie Silikone und sehr schnelle Urethan Polster für jeden Zweck. Alle Glue-U Produkte sind niederländisch entwickelt und hergestellt in Europa und USA: gleiche Qualität, gleiche Leistung.

## **Glue-U Adhesives BV**

Droogdokkeneiland 8  
5026SR Tilburg  
Niederlande

Tel. +31 (0)13 54 53 118  
E-mail: [sales@glue-u.com](mailto:sales@glue-u.com)  
Website: [www.glue-u.com](http://www.glue-u.com)

# INHALTSANGABE

6

## SHUFILL CUSHION

SUPER SOFT A20	8
SOFT A30	10
MEDIUM A50	12
FIRM A60	14

16

## SHUFILL SILICONES

SOFT A10	18
MEDIUM-SOFT A20	20
MEDIUM-SOFT TRANSPARENT A20	22
MEDIUM A30	24
FIRM A40	26

28

## SHUFILL HOOF PACKING

SUPER SOFT A15	30
SOFT A25	32
MEDIUM SOFT A35	34

36

## SHUFIX

SCHWARZ / WEISS	38
-----------------	----

40

## SHUFIT

SCHWARZ / BEIGE	42
-----------------	----

44

## PRE FIX

48

## KARTUSCHEN

AUFBEWAHRUNG	48
ANWENDUNG	49

50

## SHUPADS

52

## ZUBEHÖR

56

## GLUSHU

MINI GLUSHU	58
EINSATZBEREICHE	59

# SHUFILL CUSHION

Festes und zugleich weiches Urethan Material in vier verschiedenen Durometern: A20 Super Soft, A30 Soft, A50 Medium – und A60 Firm. Die 250cc Patronen passen in Standard Silikonpistolen. Bietet Sicherheit, Polsterung und Unterstützung für die Huf-Sohle. Bei Hufrehe bis zum Boden auffüllen. Es wird empfohlen die Glue-U Mesh zu nutzen. *Durchschnittliche Aushärtezeit 35 Sekunden. Die Temperatur und Feuchtigkeit können einen Effekt auf das Ergebnis des Produkts haben.*



**SUPER SOFT      A20**

Produkt Nummer	200120250
Beschreibung	<i>Super weiches klebendes Polstermaterial</i>
Kartusche	250cc
Farbe	<i>kristallklar</i>
Aushärtezeit	<i>35 sekunden</i>

**SOFT      A30**


Produkt Nummer	200130250
Beschreibung	<i>Weiches stoßdämpfendes klebendes Polstermaterial</i>
Kartusche	250cc
Farbe	<i>kristallklar</i>
Aushärtezeit	<i>35 sekunden</i>

**MEDIUM      A50**

Produkt Nummer	200150250
Beschreibung	<i>Weiches &amp; unterstützendes klebendes Polstermaterial</i>
Kartusche	250cc
Farbe	<i>kristallklar</i>
Aushärtezeit	<i>35 sekunden</i>


**FIRM      A60**

Produkt Nummer	200160250
Beschreibung	<i>Unterstützendes klebendes Polstermaterial</i>
Kartusche	250cc
Farbe	<i>kristallklar</i>
Aushärtezeit	<i>35 sekunden</i>

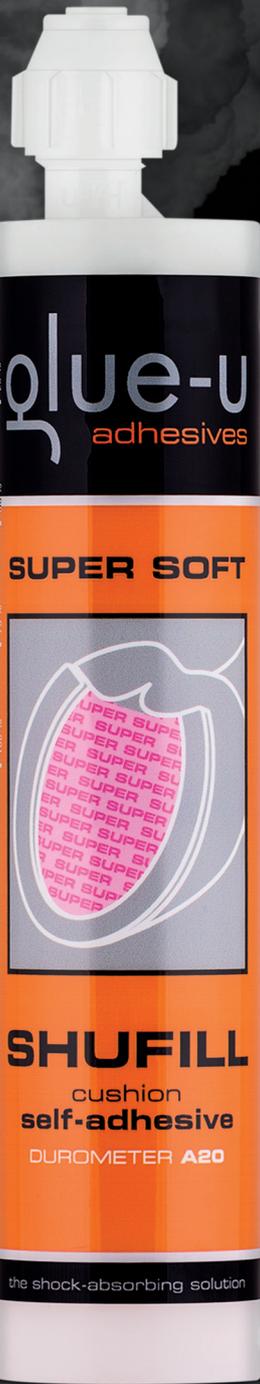

glue-u  
adhesives

**SUPER SOFT**

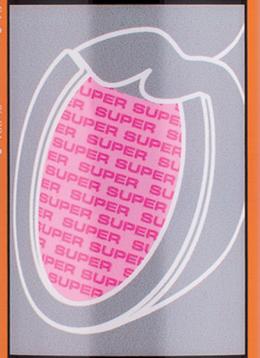

**SHUFILL**  
cushion  
**self-adhesive**  
DUROMETER A20

the shock-absorbing solution

the shock-absorbing solution  
cushion  
self-adhesive  
**SHUFILL**

# SHUFILL CUSHION

## SUPER SOFT A20

35 Sekunden schnelles härtendes Urethan Produkt, bietet sich dem Hufschmied die Gelegenheit Schmutzablagerungen zwischen Sohle und Polster zu vermeiden. Gerade weil es so weich ist, empfehlen wir dieses Produkt in Kombination mit dem Shupad zu gebrauchen..

### FEATURES:

- Sehr weiches Füllmaterial
- Bleibt weich – auch bei kaltem Wetter
- Selbstklebend
- 35 Sekunden Härtezeit  
Wird warm während der Härtung (bei sensiblen Hufen Shufill silikonen benutzen)

### STANDARD

### ANWENDUNG:


- Mit Platten

## SUPERSOFT MIT PLATTEN



MÖGLICHEN  
ANWENDUNGEN



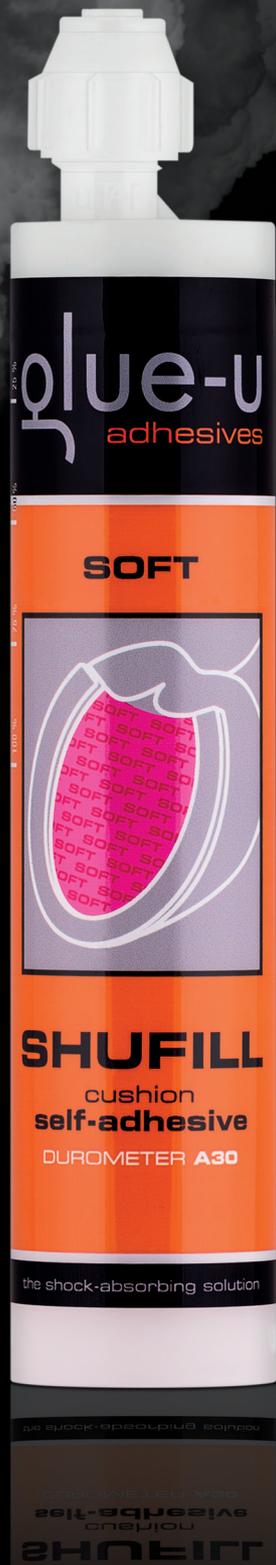

# SHUFILL CUSHION

## SOFT A30

Schnell härtendes Polstermaterial das mehr Komfort bietet am Pferd. Kann als Füllung oder Stoßdämpfung eingesetzt werden. Auch für Pferde mit Hufrehe geeignet.

### FEATURES:

- Weiches, stoßdämpfendes Füllmaterial
- Bleibt weich – auch bei kaltem Wetter
- Selbstklebend
- 35 Sekunden Aushärtezeit  
Wird warm während der Aushärtezeit (bei sensiblen Hufen Shufill Silikone zusätzlich benutzen)

### STANDARD

#### ANWENDUNG:

- Mit Platten

### ALTERNATIVE

#### ANWENDUNG:


- Mit dem Mesh bis zum Boden füllen.

## SOFT MIT MESH



## URETHAN-POLSTER EIGENSCHAFTEN



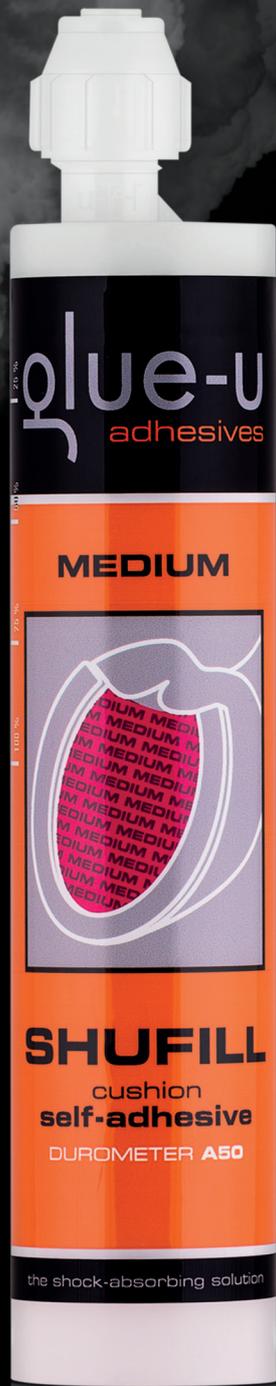

# SHUFILL CUSHION

## MEDIUM A50

Unterstützend Polstermaterial eingesetzt bei Sportpferden beschlagen oder barhuf. Kann mit einem Platte oder dem Mesh eingesetzt werden. Für das beste Ergebnis wird das Mesh empfohlen.

### FEATURES:

- Medium festes stoßdämpfendes Material
- Bleibt während des Hufbeschlags stabil – auch bei kaltem Wetter
- Selbstklebend
- 35 Sekunden Aushärtezeit
- Wird warm während der Aushärtezeit (bei sensiblen Hufen Shufill Silikone zusätzlich benutzen)

### STANDARD

#### ANWENDUNG:

- Mit Platten

### ALTERNATIVE

#### ANWENDUNG:

- Mit Mesh

## MEDIUM MIT MESH UND SCHAUMPLATTE



URETHAN -POLSTER  
ANWENDUNGSVIDEO





glue-u  
adhesives

**FIRM**



**SHUFILL**

cushion  
**self-adhesive**

DUROMETER A60

the shock-absorbing solution

the shock-absorbing solution

self-adhesive  
cushion

**SHUFILL**



# SHUFILL CUSHION

## FIRM A60

Shufill Cushion Firm ist ein unterstützendes Polstermaterial welches bei Pferden mit oder ohne Hufeisen eingesetzt werden kann. Der Druck auf den Wand wird dank der Unterstützung auf der Sohle reduziert und fördert den gesunden Huf-Wachstum.

### FEATURES:

- Hartes, unterstützendes Polstermaterial
- Bleibt während des Beschlagens stabil, selbst bei kaltem Wetter
- Selbstklebend
- 35 Sekunden Aushärtezeit
- Wird warm während der Aushärtezeit

### STANDARD

#### ANWENDUNG:

- Mit Platten

### ALTERNATIVE

#### ANWENDUNG:

- Mit Mesh

## FIRM ALS SCHUTZSCHICHT



# SHUFILL SILICONES

Festes und zugleich weiches Silikon-Polstermaterial in 5 Versionen: A10 (blau) – A20 (grün) – A20 (transparent) – A30 (lila) – A40 (gelb). Die 250cc Kartuschen passen in Standard Silikonepistolen. Bietet Sicherheit, Polsterung und Unterstützung für die Huf-Sohle. Benutzen Sie die Shufill Silicones immer in Kombination mit den Shupads! Shufill Silicones beinhalten keine Säuren oder andere Chemikalien und sind deswegen sehr geeignet für die Wundbehandlung. *Aushärtezeit 4 Minuten. Die Temperatur und Feuchtigkeit können einen Effekt auf das Ergebnis des Produkts haben.*



**SOFT****A10**

Produkt Nummer	210105250
Beschreibung	<i>Extrem weiches Silikon-Polstermaterial</i>
Kartusche	250cc
Farbe	Blau
Aushärtezeit	4 Minuten (erwärmt: 2 Minuten)

**MEDIUM-SOFT****A20**

Produkt Nummer	210107250
Beschreibung	<i>Sehr weiches Silikon-Polstermaterial</i>
Kartusche	250cc
Farbe	Grün
Aushärtezeit	4 Minuten (erwärmt: 2 Minuten)

**MEDIUM-SOFT****A20**

Produkt Nummer	210103250
Beschreibung	<i>Sehr weiches Silikon-Polstermaterial</i>
Kartusche	250cc
Farbe	Transparent
Aushärtezeit	4 Minuten (erwärmt: 2 Minuten)

**MEDIUM****A30**

Produkt Nummer	210109250
Beschreibung	<i>Weiches, stoßdämpfendes Silikon-Polstermaterial</i>
Kartusche	250cc
Farbe	Lila
Aushärtezeit	4 Minuten (erwärmt: 2 Minuten)

**FIRM****A40**

Produkt Nummer	210104250
Beschreibung	<i>Medium hartes, unterstützendes Silikon-Polstermaterial</i>
Kartusche	250cc
Farbe	Gelb
Aushärtezeit	4 Minuten (erwärmt: 2 Minuten)



# SHUFILL SILICONES

## SOFT A10

Silikon Polstermaterial, bietet sich dem Hufschmied die Gelegenheit Schmutzablagerungen zwischen Sohle und Platte zu vermeiden. Kann nur als Füllung eingesetzt werden.

### FEATURES:

- Sehr weiches Füllmaterial
- Bleibt weich, auch bei kaltem Wetter
- Nicht Klebend
- 4 Minuten Aushärtezeit
- Wenn es auf die Körpertemperatur erwärmt wird, reduziert sich die Aushärtezeit auf 2 Minuten.
- Bleibt bei einer niedrigen Temperatur während der Aushärtung
- Säurefrei

### STANDARD

### ANWENDUNG:

- Immer mit Platten


## VERSCHIEDENE HÄRTE

A10 blau für die Füllung +  
A20 grün für leichte Stoßdämpfung



SILIKON-POLSTER  
ANWENDUNGSVIDEO



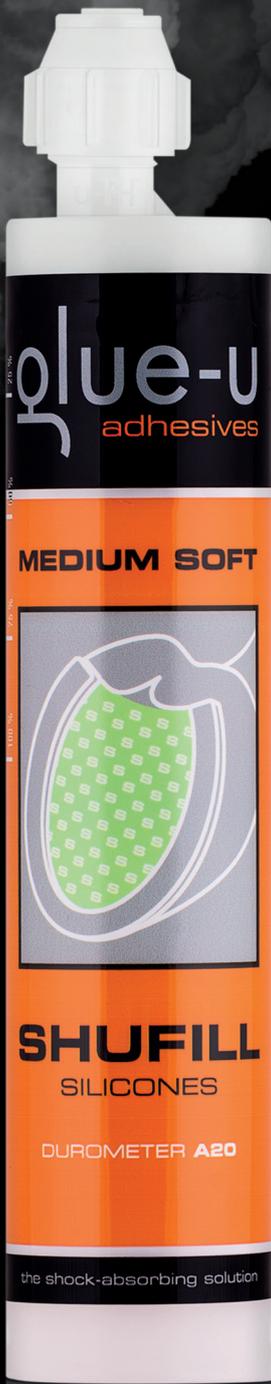

glue-u  
adhesives

MEDIUM SOFT



SHUFILL  
SILICONES

DUROMETER A20

the shock-absorbing solution

the shock-absorbing solution

SILICONES

SHUFILL



# SHUFILL SILICONES

## MEDIUM-SOFT A20

Silikon Polstermaterial, bietet sich dem Hufschmied die Gelegenheit Schmutzablagerungen zwischen Sohle und Platte zu vermeiden. Kann sowohl als Füllung als auch leichte Stoßdämpfung eingesetzt werden.

### FEATURES:

- Sehr weiches Füllmaterial
- Bleibt weich, auch bei kaltem Wetter
- Nicht Klebend
- 4 Minuten Aushärtezeit
- Wenn es auf die Körpertemperatur erwärmt wird, reduziert sich die Aushärtezeit auf 2 Minuten
- Bleibt bei einer niedrigen Temperatur während der Aushärtung
- Säurefrei

### STANDARD

### ANWENDUNG:


- Immer mit Platten

## GANZE FÜLLUNG MIT SHUPAD STRAHL UNTERSTÜTZUNG




MÖGLICHEN  
ANWENDUNGEN



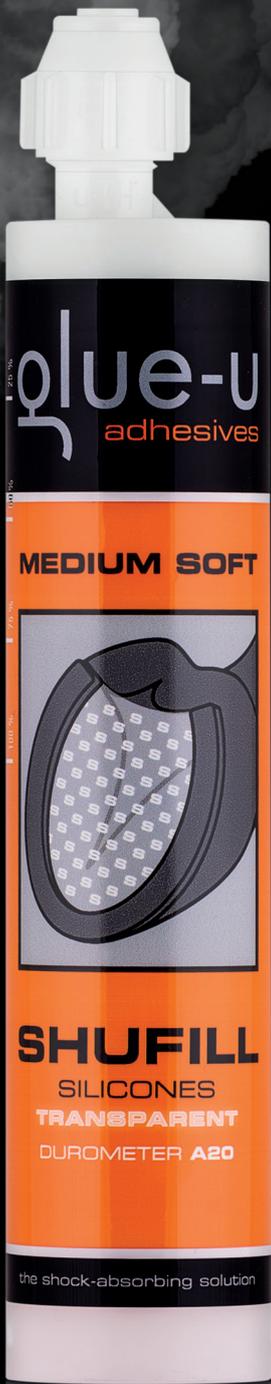

glue-u  
adhesives

MEDIUM SOFT

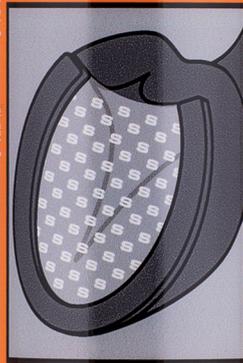

**SHUFILL**


SILICONES  
TRANSPARENT

DUROMETER A20

the shock-absorbing solution

the shock-absorbing solution

SILICONES  
SHUFILL

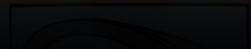

# SHUFILL SILICONES

## MEDIUM-SOFT A20 TRANSPARENT

Silikon Polstermaterial, bietet sich dem Hufschmied die Gelegenheit Schmutzablagerungen zwischen Sohle und Platte zu vermeiden. Kann sowohl als Füllung als auch leichte Stoßdämpfung eingesetzt werden.

### FEATURES:

- Weiche Füllung / leichte Stoßdämpfung
- Nicht Klebend
- Bleibt weich, auch bei kaltem Wetter
- 4 Minuten Aushärtezeit (wenn erwärmt reduziert sich die Aushärtezeit auf 2 Minuten)
- Bleibt bei einer niedrigen Temperatur während der Aushärtung
- Säurefrei

### STANDARD

### ANWENDUNG:


- Immer mit Platten

## GANZE FÜLLUNG MIT SHUPAD




SILIKON-POLSTER  
EIGENSCHAFTEN



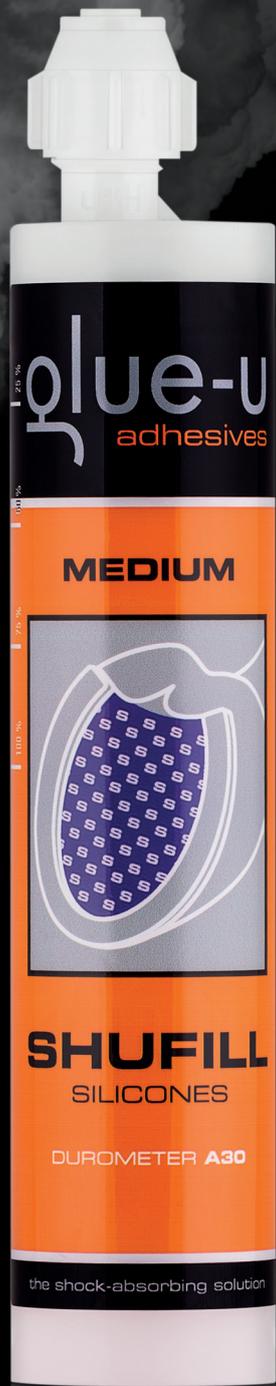

glue-u  
adhesives

MEDIUM

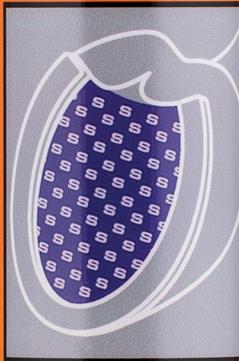

SHUFILL  
SILICONES

DUROMETER A30

the shock-absorbing solution

the shock-absorbing solution

SILICONES  
SHUFILL

# SHUFILL SILICONES

## MEDIUM A30

Dieses Silikon-Polstermaterial wird meist für die Stoßdämpfung eingesetzt. Es bietet Sportpferden mehr Komfort und reduziert den Stress bei von Hufrehe betroffenen Hufen.

### FEATURES:

- Medium festes stoßdämpfendes Material
- Nicht Klebend
- Bleibt weich, auch bei kaltem Wetter
- 4 Minuten Aushärtezeit (wenn erwärmt reduziert sich die Aushärtezeit auf 2 Minuten)
- Bleibt bei einer niedrigen Temperatur während der Aushärtezeit
- Säurefrei


### STANDARD

### ANWENDUNG:

- Immer mit Platten

## GANZE FÜLLUNG MIT SHUPAD



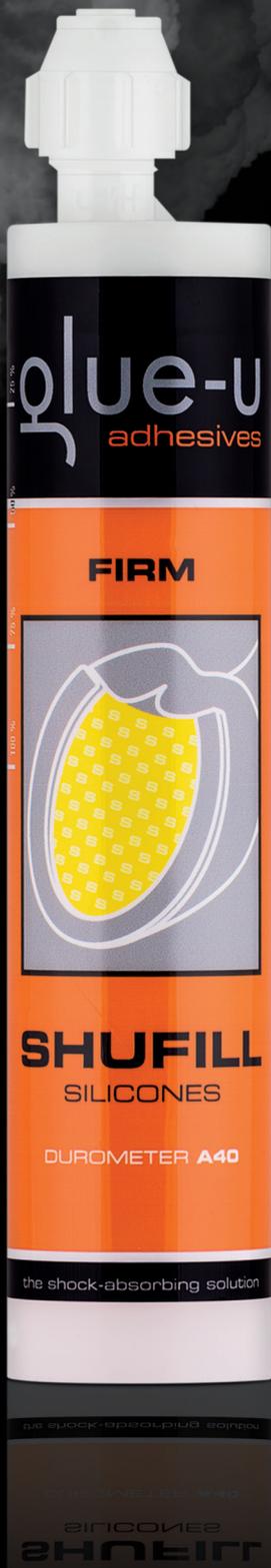

# SHUFILL SILICONES

## FIRM A40

Dieses feste Polstermaterial bietet die beste Unterstützung für Sportpferde. Die Stoßdämpfung gibt den besten Komfort für Springpferde und Pferde, die auf harten Böden laufen.

### FEATURES:

- Medium festes, leichtes, unterstützendes Material
- Nicht Klebend
- Bleibt weich, auch bei kaltem Wetter
- 4 Minuten Aushärtezeit (wenn erwärmt reduziert sich die Aushärtezeit auf 2 Minuten)
- Bleibt bei einer niedrigen Temperatur während der Aushärtezeit
- Säurefrei

### STANDARD

### ANWENDUNG:

- Immer mit Platten

## OPTIMALER SUPPORT MIT SHUPAD



# SHUFILL

## HOOF PACKING

Leichter Huf-Füller für die Stoßdämpfung und den Schutz. Von Hand gemischt. Vorhanden in 2×660 gr oder 2×2.5 kg und folgenden Durometern A15 (blau) – A25 (pink) – A35 (grün). Speziell für den Schutz des Innenhufs und der Oberfläche. Einfach zu mischen und zu formen. Shufill Hoofpacking irritiert die Haut- und Hufoberfläche nicht. Einfach zu schneiden, was es in vielen verschiedenen Situationen anwendbar macht. Shufill Hoofpacking enthält keine Säuren oder andere Chemikalien und ist deswegen sehr geeignet für die Wundbehandlung. *Die Temperatur und Feuchtigkeit können einen Effekt auf das Ergebnis des Produkts haben. Das Erwärmen von Shufill Hufverpackung vor der Anwendung kann einen signifikanten Einfluss auf die Aushärtezeit haben.*



**SUPER SOFT      A15**

Produkt Nummer	250105660 (660 gr) / 250105025 (2500 gr)
Beschreibung	Extra weiches Silikon-Polstermaterial von Hand gemischt
Jar / Bucket	2x660 gr / 2x2500 gr
Farbe	Blau
Aushärtezeit	4-5 Minuten (erwärmt 2-3 Minuten)

**SOFT      A25**

Produkt Nummer	250105660 (660 gr) / 250105025 (2500 gr)
Beschreibung	Weiches Silikon-Polstermaterial von Hand gemischt
Jar / Bucket	2x660 gr / 2x2500 gr
Farbe	Pink
Aushärtezeit	4-5 Minuten (erwärmt 2-3 Minuten)

**MEDIUM      A35**

Produkt Nummer	250105660 (660 gr) / 250105025 (2500 gr)
Beschreibung	Medium Silikon-Polstermaterial von Hand gemischt
Jar / Bucket	2x660 gr / 2x2500 gr
Farbe	Grün
Aushärtezeit	4-5 Minuten (erwärmt 2-3 Minuten)



# SHUFILL HOOF PACKING

## A15 BLUE

Ist ein extra weiches Material von Hand gemischt. Es wird meist für die Füllung, leichte Stoßdämpfung oder einfach nur um dem Pferd etwas mehr Komfort zu bieten angewandt. Da das Produkt sehr weich ist, kann es nur verwendet werden, um die Sohle komplett zu füllen. Bei Hufrehe oder anderen Fällen, bei denen es extrem schmerzhaft Stellen gibt, die isoliert werden müssen, kann es stellenweise weggeschnitten werden. Jedoch nur sobald das Eisen und das Polstermaterial angebracht worden sind.

### FEATURES:

- Sehr weiches Polster
- Nicht giftig
- Hautfreundlich (irritiert nicht und ruft auch keine allergischen Reaktionen hervor)
- Aushärtezeit 4-5 Minuten (erwärmt 2-3 Minuten)
- Einfach zu mischen und zu formen
- Kann mit jeder medizinischen Anwendung kombiniert werden

### STANDARD

#### ANWENDUNG:

- Immer mit Platten

### ALTERNATIVE

#### ANWENDUNG:

- Medizinische Platte

## MEDIZINISCHE PLATTE



## HUFFÜLLER ANWENDUNGSVIDEO





# SHUFILL HOOF PACKING

## A25 PINK

Ist ein weiches Polster. Ist die meist angewandte Version dieser Produkte. Bietet eine perfekte Stoßdämpfung der ganzen Sohle oder lokal, solange der Strahl-Support in Kombination mit zum Beispiel Heartbar Eisen eingesetzt wird.

### FEATURES:

- Weiches Polster
- Nicht giftig
- Hautfreundlich (irritiert nicht und ruft auch keine allergischen Reaktionen hervor)
- Aushärtezeit 4-5 Minuten (erwärmt 2-3 Minuten)
- Einfach zu mischen und zu formen
- Kann mit jeder medizinischen Anwendung kombiniert werden

### STANDARD

#### ANWENDUNG:

- Ganze Füllung mit Platte

### ALTERNATIVE

#### ANWENDUNG:

- Lokal (Geschlossenes- + Herzhufeisen)

## GANZE FÜLLUNG MIT PLATTE



MÖGLICHEN  
ANWENDUNGEN





# SHUFILL HOOF PACKING

## A35 GREEN

Ist der beste Partner zur Unterstützung des ganzen Hufes oder nur lokal am Strahl des Hufes. Dank des starren Ende des Produkts ist es einfach mit allen Sorten Hufeisen oder Polstern zu benutzen.

### FEATURES:

- Starres Polster
- Nicht giftig
- Hautfreundlich (irritiert nicht und ruft auch keine allergischen Reaktionen hervor)
- Aushärtezeit 4-5 Minuten (erwärmt 2-3 Minuten)
- Einfach zu mischen und zu formen
- Kann mit jeder medizinischen Anwendung kombiniert werden

### STANDARD

#### ANWENDUNG:

- Ganze Füllung mit Platte

### ALTERNATIVE

#### ANWENDUNG:

- Lokal (Geschlossenes- + Herzhufeisen)

## GANZE FÜLLUNG MIT PLATTE



HUFFÜLLER  
EIGENSCHAFTEN



# SHUFIX

## SUPER SCHNELL

Kleber aus Urethan ist sehr gut für Erweiterungen an den Hufen von Fohlen und maßgefertigte Kunststoff Beschlag. Zudem geeignet für den Wiederaufbau des Ballens, für mediale/laterale Korrekturen und für kleine Reparaturen des Hufes. Der Huf sollte sauber und vor allem trocken sein. Die 250cc Patronen passen in Standard Silikonpistolen. *Aushärtezeit liegt bei ungefähr 30 – 60 Sekunden; zu bearbeiten nach ungefähr 5 Minuten. Temperatur und Feuchtigkeit können das Ergebnis des Produkts beeinflussen.*



## SCHWARZ

Produkt Nummer	150102250
Beschreibung	<i>Schnelle Reparatur von Rissen – super schnelle Aushärtezeit bei Huferweiterungen von Fohlen</i>
Kartusche	250cc
Farbe	Schwarz
Aushärtezeit	30-60 Sekunden

## WEISS

Produkt Nummer	150101250
Beschreibung	<i>Schnelle Reparatur von Rissen – super schnelle Aushärtezeit bei Huferweiterungen von Fohlen</i>
Kartusche	250cc
Farbe	Weiß
Aushärtezeit	30-60 Sekunden



# SHUFIX SCHWARZ / WEISS

Shufix ist ein ultra schneller Kleber, welcher sehr für die Huferweiterungen von Fohlen und für maßgefertigte Kunststoffbeschläge geeignet ist. Zudem geeignet für den Wiederaufbau des Ballens, für mediale/laterale Korrekturen und für kleine Reparaturen des Hufes. Shufix kann selbst bei extremen Wintern für die meisten Kunststoffbeschläge benutzt werden. Da das Produkt aus Urethan besteht, sollte der Huf vor Anwendung trocken und sauber sein.

## FEATURES:

- Verfügbar in schwarz und weiß
- Nicht giftig
- Super schnelle Aushärtezeit (30 - 60 Sekunden)
- Einfach zu raspeln
- Festes aber zugleich flexibles Material
- Hohe Temperaturen während der Aushärtezeit (am besten +/- 1 cm) vom Kronsaum)

## HUFERWEITERUNG



## STANDARD

### ANWENDUNG:

- Huferweiterungen

## ALTERNATIVE

### ANWENDUNG:

- Klebebeschläge
- Hufspalt-Reparaturen in extremen Wintern
- Zeitweiser Schutz
- Ballen Lift

## HUFSPALT-REPARATUR ANWENDUNGSVIDEO



# SHUFIT

## GLUE ON SHOE

Acryl-Kleber für den Verbund von Hufbeschlägen und Hufwand Reparaturen. Verfügbar in 150cc und 420cc schwarz und beige. Passen in Standard Silikonpistolen. Es ist auch möglich nur den Glue-U Spender für die 150cc Patrone zu benutzen. Die 420cc Patrone ist nur mit einer speziellen Pistole zu benutzen. Verbindet Stahl, Aluminium und Urethan Beschläge. Geeignet für die Reparatur von großen Spalten und Huferweiterungen. *Aushärtezeit: 90-120 Sekunden. Belastung in 4-5 Minuten (selbst bei kaltem Wetter). Temperatur und Feuchtigkeit können einen Effekt auf das Ergebnis des Produkts haben. Das vorherige Aufwärmen von Shufit beschleunigt die Aushärtezeit signifikant.*



## SCHWARZ

Produkt Nummer	100102150 / 100102420
Beschreibung	Schuhe kleben / Huf Reparatur
Kartusche	150cc / 420cc
Farbe	Schwarz
Aushärtezeit	4-6 Minuten / Belastung nach 7-8 Minuten Erwärmt; 120-180 Sekunden

## BEIGE

Produkt Nummer	100114150 / 100114420
Beschreibung	Schuhe kleben / Huf Reparatur
Kartusche	150cc / 420cc
Farbe	Beige
Aushärtezeit	4-6 Minuten / Belastung nach 7-8 Minuten Erwärmt; 120-180 Sekunden



## SHUFIT SCHWARZ / BEIGE

Shufit Acryl-Kleber ist der vielseitigste Kleber in der Pferde-Industrie. Er kann für das Kleben aller Arten von Beschlägen oder für die Reparaturen von kleinen Spalten bis extremen Hufwand Problemen eingesetzt werden. Dank dieser großartigen Eigenschaften ist Shufit ganz einfach per Hand zu mischen und einfach mit Glue-U Mischdüse zu vermischen für die perfekte Mixtur. Zudem kann Shufit selbst während der Aushärtezeit noch bewegt werden.

### FEATURES:

- Verfügbar in schwarz und beige
- 150cc Kartuschen (passen in Standard Silikonepistolen)
- Per Hand oder mit Glue U Mischdüse
- Hohe Haftung
- Einfach zu raspeln
- Festes aber zugleich
- Aushärtezeit kann beschleunigt werden, wenn es mit Körperwärme erwärmt wird

### STANDARD

#### ANWENDUNG:

- Klebe Beschläge

### ALTERNATIVE

#### ANWENDUNG:

- Spaltreparaturen
- Hufreparaturen

## KLEBEN VON GLUSHU



GLUSHU / SHUFIT  
ANWENDUNGSVIDEO



# PRE FIX SUPER KLEBER

Pre fix ist ein System zum Verbund von GluShu an den Huf, nur um es an Ort und Stelle zu halten. Es ist ein 2-Komponenten Superkleber, welcher in Sekunden den GluShu an den Huf bindet. Dies erlaubt den eigentlichen Vorgang des Klebens mit den Hufen auf dem Boden zu erledigen. Pre fix ist sehr hilfreich bei nervösen Pferden oder Pferden, die nicht auf drei Beinen stehen können (Hufrehe oder Verletzung). *Pre fix ist kein Strukturkleber. Er wird nur zeitweise eingesetzt, um den GluShu an seinem Platz zu halten bis der tatsächliche Kleber eingesetzt wird. Eine Komponente ist das Activator Spray, die andere Komponente ist das transparente Gel in einer Quetschflasche.*



## AKTIVATOR

Produkt Nummer	490100200
Beschreibung	Vorkleben Glushu in Kombination mit Pre fix CA Kleber
Kartusche	200cc
Farbe	Transparent
Aushärtezeit	15 Sekunden

## CA KLEBER

Produkt Nummer	490101100
Beschreibung	Vorkleben Glushu in Kombination mit Pre fix Activator
Kartusche	150cc
Farbe	Tranparent
Aushärtezeit	15 Sekunden



## PRE FIX

Pre fix wird in zwei Schritten eingesetzt. Wenn der GluShu geformt und angepasst wurde und dieser angebracht werden soll, muss der Pre fix Kleber gemäß des Anleitungsvideos angebracht werden und der Huf für den tatsächlichen Klebevorgang mit Shufit abgestellt werden.

### FEATURES:

- 15 Sekunden Aushärtezeit
- Verbindet sobald zwei Komponenten in Kontakt kommen

### STANDARD

### ANWENDUNG:

- Nur für vor der Anwendung von Glushu Beschlägen geeignet

## PRE FIX GLUSHU



GLUSHU / PRE FIX  
ANWENDUNGSVIDEO



# KARTUSCHE

## AUFBEWAHRUNG

### JA

Vor dem Einfrieren beschützen.

Shufit bei ca. 10 °C aufbewahren.

Poly-Urethane und Silikone bei einer Temperatur von ca. 15°C aufbewahren.

Produkte trocken aufbewahren.

“First in First out” Nutzung.

Kartuschen aufrecht aufstellen.

Es ist möglich den Mischdüse als Deckel zu benutzen.

### NEIN

Das Produkt kontinuierlich bei verschiedenen Temperaturen aufbewahren.

Benutzte Kartusche wieder einlagern.

Die Kartusche für ein paar Minuten öffnen.

Die Kartusche nach Benutzung geöffnet lassen.

# KARTUSCHE

## NUTZUNG

### JA

**Das Level der beiden Komponenten kontrollieren.**

Sichergehen, dass beide Kanäle frei sind.

Bevor es tatsächlich angewandt wird, erst ein kleines Bisschen aus der Tube in einen Becher quetschen, um sicher zu gehen, dass die Mixtur korrekt ist und der Mischdüse eingesetzt werden kann.

Gehen Sie sicher, dass das Produkt korrekt vermischt wurde, bevor Sie dieses am Huf anwenden.

Arbeiten Sie in gut ventilierten Orten.

Tragen Sie Schutzkleidung und Handschuhe.

Schneiden Sie den Huf wie üblich. Das Ausschneiden ist der wichtigste Teil des Jobs.

Während Sie kleben, halten Sie den Huf hoch bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist (Aushärtezeit hängt von der Temperatur und Feuchtigkeit ab).

### NEIN

**Atmen Sie das Produkt nicht ein.**

Das Produkt kann gegebenenfalls allergische Reaktionen hervorrufen.

Nicht auf Wunden oder offener Haut auftragen.


Zu viel Kleber bedeutet mehr Hitze. Nicht zu viel Kleber auf einmal benutzen.

Vermeiden Sie Kleber auf der Sohle oder dem Strahl.

Die Kartuschen nicht in heißem Wasser erwärmen. Luftherwärmung reicht.

# SHUPADS

Die Basis für Silikone und Polster. Diese transparenten Platte sind in vier verschiedenen Sorten vorhanden. M und XL flach, L flach und Keil mit Unterstützung für den Strahl. Es ist sehr einfach diese Polster für jeden Huf zurecht zu schneiden. Nutzen Sie unsere Größentabelle, um die Größe herauszufinden, die Sie benötigen. Das qualitativ hochwertige Urethan Material garantiert, dass der Huf-Mechanismus nicht eingeschränkt wird und hält das Polstermaterial in Position. *Erfahrungen zeigen, dass Glue-U Shupads extra langlebig sind. Jedes Shupad ist mit selbstschließenden Injektionslöchern ausgestattet. Das Füllen der Hufe wird mit den Glue-U Shupads einfacher.*

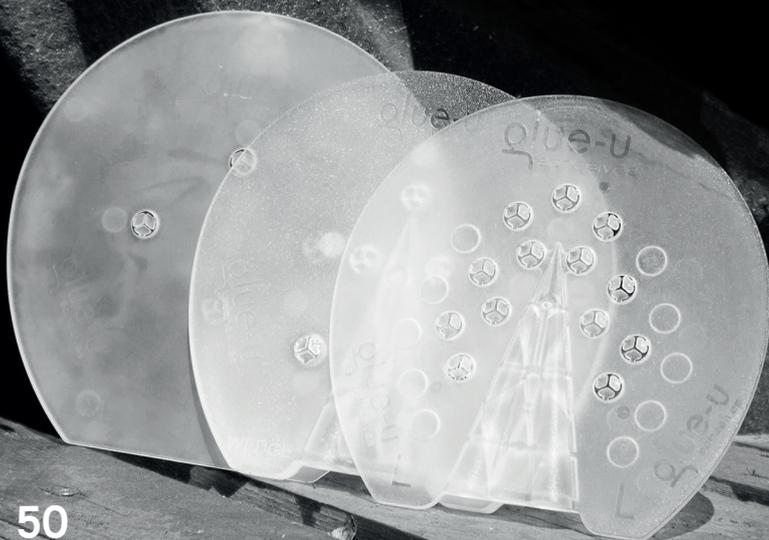

## FLAT FLEX

Produkt Nummer	810050010
Beschreibung	Flaches Platte mit 4 Fülllöchern
Volume	10 Stück (Medium)
Farbe	Transparent
Dimensions	150 x 155 mm

## FROG SUPPORT FLEX

Produkt Nummer	810060010
Beschreibung	Flaches Platte mit mehreren Fülllöchern und Support für den Strahl
Volume	10 Stück (Large)
Farbe	Transparent
Dimensions	165 x 165 mm

## FLAT FLEX

Produkt Nummer	810070010
Beschreibung	Flaches Platte mit 4 Fülllöchern
Volume	10 Stück (Extra Large)
Farbe	Transparent
Dimensions	180 x 180 mm

## WEDGE

Produkt Nummer	810060006
Beschreibung	Keil Platte mit mehreren Fülllöchern und Support für den Strahl
Volume	6 Stück (Large)
Farbe	Transparent
Dimensions	165 x 165 mm 3° Keil; 10 mm



# ZUBEHÖR WERKZEUGE



## ADAPTER

Produkt nummer	490002001
Beschreibung	Für die normale Benutzung einer 150cc Shufit Kartusche
Volume	1 St



## PISTOLE FÜR SHUFIT 150cc

Produkt nummer	827100150
Beschreibung	Pistole
Volume	1 St



## PISTOLE FÜR SHUFIT 420cc

Produkt nummer	827100420
Beschreibung	420 cc Pistole
Volume	1 St



## PISTOLE UNIVERSAL

Produkt nummer	820000000
Beschreibung	150 & 250 cc Pistole
Volume	1 St



### DRAW KNIFE

Product Nummer	490000002
Beschreibung	Messer für das Entfernen von Glushu
Volume	1 St



### SELBSTKLEBENDES SCHAUMPLATTE

Produkt nummer	810001020
Beschreibung	Selbstklebendes Schaumplatte 199 x 199 mm / 7.85 x 7.85"
Volume	20 pcs



### HAND WICKEL FOLIE

Produkt nummer	890503001
Beschreibung	Hufverpackungs-Folie
Volume	1 St



### HAND WICKEL FOLIENHALTER

Produkt nummer	890512001
Beschreibung	Hufverpackungs-Folienhalter
Volume	1 St



### ERHITZER 150CC & 250cc / 420cc

Produkt nummer	890312150 / 890312420
Beschreibung	Kartusche Aufwärm-Box 12V, 230V
Volume	1 St



### MESH

Produkt nummer	892002010
Beschreibung	Mesh für Shufill Polster 2500 x 200 mm
Volume	1 St




### MISCHDÜSE

Produkt nummer	610007010
Beschreibung	Grüner, viereckiger Mischdüse
Volume	10 St



### SHUCLEANER

Produkt nummer	490000750
Beschreibung	Aceton freie Hufreinigung
Volume	750cc

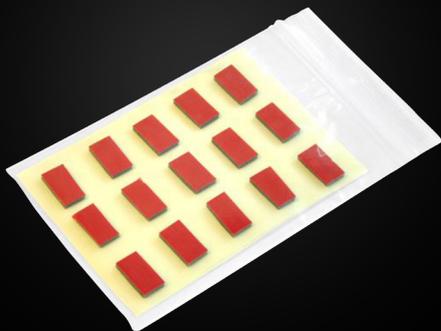

### SPACER TAPE

<b>Produkt nummer</b>	891002010
<b>Beschreibung</b>	Spezielles Klebeband als Platzhalter zwischen Huf und Hufbeschlag
<b>Volume</b>	15 St



### SHUFIT DYE

<b>Produkt nummer</b>	891002001
<b>Beschreibung</b>	Schwarzes Pigment, um Shufit zu färben Von Beige zu Schwarz
<b>Volume</b>	1 St



### KORREKTURPLATTEN

<b>Produkt nummer</b>	420290075 / 420290085 / 420290095
<b>Beschreibung</b>	Mini Glushu Erweiterungsplatten für jede Art der Erweiterung
<b>Volume</b>	2 St



### ERWEITERUNGEN FÜR GLUSHU & MINI GLUSHU

<b>Produkt nummer</b>	In jeder Größe verfügbar
<b>Beschreibung</b>	Strahlunterstützung, Keile, geschlossene Platte (für Glushu)
<b>Volume</b>	2 St

# GLUSHU

## KLEBEBESCHLAG

Glushu ist ein alu Hufeisen ummantelt mit abriebfestes Gummi. Muss geklebt worden mit der Laschen an der Außenseite von huf. Dies bietet dem Pferd eine leichten, hufunterstützenden, gepolsterten Beschlag, welcher jeglichen Stress oder Schaden eliminiert und einfach anzubringen ist. GLUSHUS sind nicht invasiv, was bedeutet, dass kein Risiko einer Huf-Verletzung während des Vernagelns besteht. Einfach und schnell anzuwenden. Vorhanden in Paaren oder einem Kit. *Es wird ein Schnellkleber benutzt. Wir empfehlen unseren Glue Shufit Kleber, der speziell für den GluShu designt wurde. GluShu macht das Kleben in Phasen möglich. Es sind keine speziellen Geräte notwendig. Einfaches Größensystem & große Auswahl an Größe. Keine Änderungen notwendig. Eliminiert das Risiko eines Schadens während des Vernagelns in White-Lines oder beschädigter Hufwand. Polstert den Huf. Glushu kann zudem oberflächliche Medikamente am Platz halten. Verhindert weiteren Schaden der Hufwand.*



# GLUSHU KITS & PAARE

Kits beinhalten alle essenziellen Geräte, um die Glushus zu befestigen;

1x Paar GluShu

1x Shufit 150cc

1x Adapter

4x Mischdüse

KIT GRÖSSE	Produktnummer
4x0 Vorne	410290040
3x0 Vorne	410290030
00 Vorne	410290020
0 Vorne	410290010
1 Vorne	410290001
2 Vorne	410290002
3 Vorne	410290003
4 Vorne	410290004
2x0 Hinten	410291020
0 Hinten	410291010
1 Hinten	410291001
2 Hinten	410291002
3 Hinten	410291003

PAAR GRÖSSE	Produktnummer
4x0 Vorne	400290040
3x0 Vorne	400290030
00 Vorne	400290020
0 Vorne	400290010
1 Vorne	400290001
2 Vorne	400290002
3 Vorne	400290003
4 Vorne	400290004
2x0 Hinten	400291020
0 Hinten	400291010
1 Hinten	400291001
2 Hinten	400291002
3 Hinten	400291003

# MINI GLUSHU FOAL SHOE

Mini Glushu ist eine kleinere Version von dem Standard Glushu; anwendbar für sowohl die Vorder- als auch Hinterseite. Diese Mini Glushu sind sehr geeignet für Fohlen und Shetland Ponys. Es ist ein sehr vielseitiges Eisen mit vielen Möglichkeiten. Zudem kann es außerdem mit den Mini Glushu Erweiterungsplatten kombiniert werden.

Für Kunden, die nur Mini Glushus anwenden, können wir außerdem ein Anwendungskit anbieten, welches alles beinhaltet, um 5 Mini Glushu Sets zu kleben.

Anwendungskit;  
1x Shufit 150cc  
1x Adapter  
1x Pre fix set  
10x Mischdüse

PAAR GRÖSSE	Produktnummer
75 mm	400290075
85 mm	400290085
95 mm	400290095

PRODUKT	Produktnummer
Anwendungskit	410290000
Korrekturplatten	420290075
	420290085
	420290095

# ANWENDUNG

Glushu ist ein Klebebeschlag, welches sehr einem normalen Stahl/Aluminium Eisen ähnelt. Es kann in jeder Situation angewandt werden, in der das Vernageln schwierig, unmöglich oder nicht erwünscht ist. Glushu wird an die Hufwand geklebt, was bedeutet, dass die Einschränkung des Hufmechanismus gering ist. Glushu kann zudem auch mit allen Glue-U Shufill Polstern oder Glushu Platten mit Shufill Hoofpacking oder Silikonen kombiniert werden. Glushu kann einfach umgeformt und geschliffen werden.

## *STANDARD*

### *ANWENDUNG:*

Glushu Vorne – oder Hinten-Komplett-Eisen. Falls es kombiniert werden soll mit Shufill Polstern oder Platten.

SEHE DER LINK FÜR DAS ANWENDUNGSVIDEO – SEITE 43



MODIFIZIERUNG  
ANLEITUNGSVIDEO





**ALTERNATIVE ANWENDUNG:**

Glushu Vordereisen + Vorderhalterung ausschneiden, um den Breakpoint für eine besseres Abrollen zu repositionieren. Falls der Glushu eine ebene Oberfläche haben soll, kann es in eine runde Form geschliffen werden.

**ALTERNATIVE ANWENDUNG:**

Glushu Hintereisen + Vorderhalterung ausschneiden, um es als offenes Eisen zu verwenden. Fersen können ebenfalls für ein besseres Abrollen geschliffen werden.



**ALTERNATIVE ANWENDUNG:**

Glushu kombiniert mit Mesh oder Platte für die Füllung mit Polstermaterialien. Mesh oder Platte kurz vor der Anwendung ankleben.



## MINI GLUSHU ERWEITERUNGS- PLATTEN:

Mini Glushu angleichen mit Erweiterungsplatten bevor jegliche Hufstand-Korrektur angeklebt wird.




## MINI GLUSHU ANWENDUNG:

Mini Glushu kombiniert mit Platte und Shufill Hoofpacking, um den Stress auf der Sohle zu weit wie möglich zu verringern. Die beschädigte Zehe bleibt für die tägliche Desinfizierung und Säuberung offen.

## GLITTER GLUSHU ANWENDUNG:



Dies ist ein Glushu Special, für diejenigen, die eine Glitter-Anfrage bekommen. Anika Ridgeway zeigt wie der Glue-U Shufit für den gewünschten Look modifiziert wird.

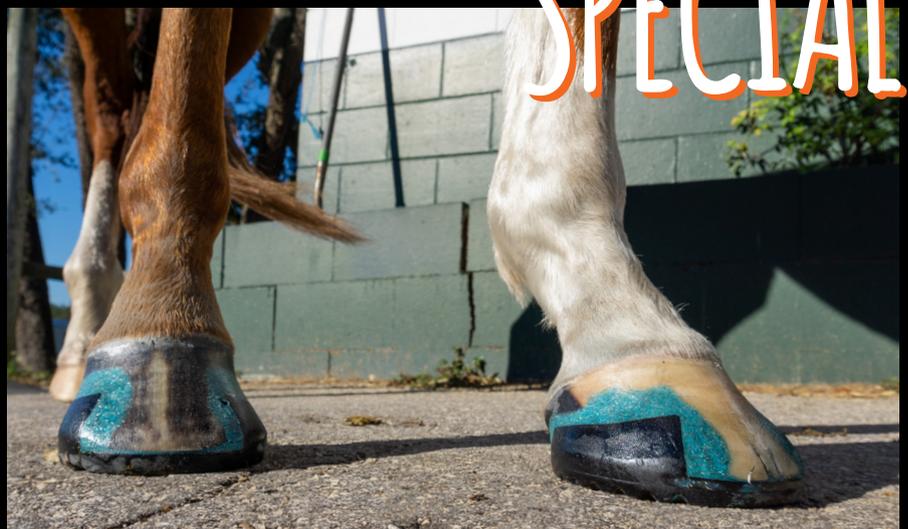





## **Glue-U Adhesives BV**

Droogdokkeneiland 8  
5026SR Tilburg  
Niederlande

Tel. +31 (0)13 54 53 118

E-mail: [sales@glue-u.com](mailto:sales@glue-u.com)

Website: [www.glue-u.com](http://www.glue-u.com)