



PRODUCT GUIDE

Glue-U Adhesives is a Dutch company making innovating products for farriers and horses since 2006. Following our philosophy *“together we take care of your horse”* we designed special adhesives to glue any kind of horseshoes, acid free silicones and very fast urethane fillers for any purpose. All Glue-U products are Dutch engineered and manufactured both in Europe and USA: same quality, same performance.

Glue-U Adhesives BV

Droogdokkeneiland 8
5026SR Tilburg
The Netherlands

Tel. +31 (0)13 54 53 118

E-mail: sales@glue-u.com

Website: www.glue-u.com

TABLE OF CONTENTS

6

SHUFILL CUSHION

SUPER SOFT A20	8
SOFT A30	10
MEDIUM A50	12
FIRM A60	14

16

SHUFILL SILICONES

SOFT A10	18
MEDIUM-SOFT A20	20
MEDIUM-SOFT TRANSPARENT A20	22
MEDIUM A30	24
FIRM A40	26

28

SHUFILL HOOV PACKING

SUPER SOFT A15	30
SOFT A25	32
MEDIUM SOFT A35	34

36

SHUFIX

BLACK / WHITE	38
---------------	----

40

SHUFIT

BLACK / BEIGE	42
---------------	----

44

PRE FIX

48

CARTRIDGES

STORAGE	48
USE	49

50

SHUPADS

52

ACCESSORIES

56

GLUSHU

MINI GLUSHU	58
APPLICATIONS	59

SHUFILL CUSHION

Sert ama yumuřak urethane ped maddesi 4 durometere (Plastik Sertlik Ölçer) A20 Süper Yumuřak – A30 Yumuřak – A50 Orta – A60 Sert. 250cc kartuřlar standard silicon tabancalarına uyar. Ayak tabanını koruma, tamponlama ve desteklemeyi sunar. Yaralanmıř ve laminitis vakalarında destek için zemine temas eden yere kadar doldurun. Ağ gözlü temin edilebilen pedlerin kullanımı önerilir, ama bir zorunluluk deęildir. *Ayarlanan zaman yaklařık olarak 35 saniyedir. Sıcaklık ve nem bu ürünün performansını etkileyebilir.*



SÜPER YUMUŞAK A20

Ürün Numarası	200120250
Tanım	Süper Yumuşak ped yapışkan maddeli
Kartuş	250cc
Renk	Kristal Berraklığı
Ayarlama Zamanı	35 saniye

YUMUŞAK A30

Ürün Numarası	200130250
Tanım	Yumuşak Şok Emici Yapışkan Maddeli Ped
Kartuş	250cc
Renk	Kristal Berraklığı
Ayarlama Zamanı	35 saniye

ORTA A50

Ürün Numarası	200150250
Tanım	Yumuşak & Destekleyici Yapışkan Maddeli Ped
Kartuş	250cc
Renk	Kristal Berraklığı
Ayarlama Zamanı	35 saniye


SERT A60

Ürün Numarası	200160250
Tanım	Destekleyici Yapışkan Maddeli Ped
Kartuş	250cc
Renk	Kristal Berraklığı
Ayarlama Zamanı	35 saniye



glue-u
adhesives

SUPER SOFT

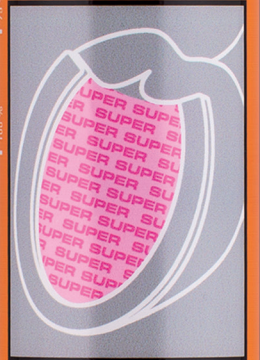

SHUFILL
cushion
self-adhesive
DUROMETER A20

the shock-absorbing solution

the shock-absorbing solution
cushion
self-adhesive
SHUFILL

SHUFILL CUSHION

YUMUŞAK A20

Yumuşak hızlı tırnak ped maddesi atlara daha fazla konfor sunar. Şok emme amaçlı olarak dolgular ped ile pedsiz kullanılabilir. Sakatlanan atlara büyük yararlar verebilir.

ÖZELLİKLERİ:

- Çok yumuşak dolgu maddesi
- Soğuk hava koşullarında yumuşak kalmaya devam eder
- Tabana yapışır
- 35 saniye hazırlama süresi
- Hazırlanırken ısınır (hassas ayaklarda Shufill silikonunun kullanımı önerilir)

STANDARD UYGULAMA:


- Ped ile

SUPERSOFT İLE PED



OLASI
UYGULAMALARI
GÖRÜN



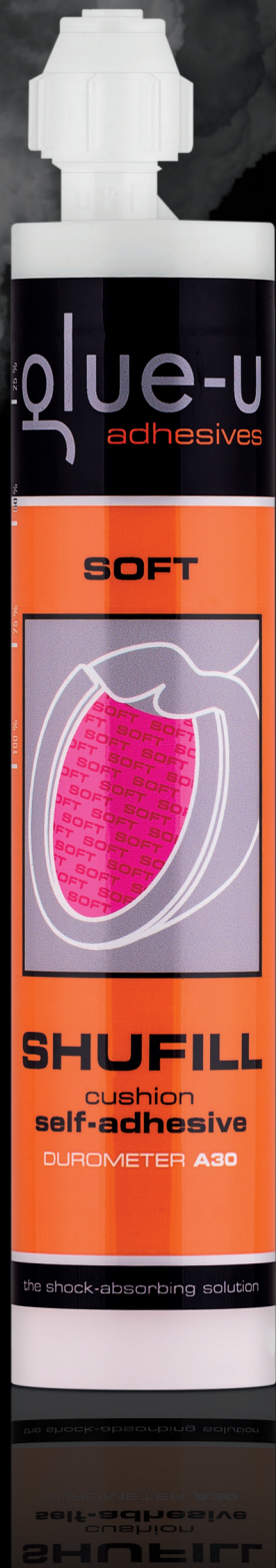

SHUFILL CUSHION

SUPER SOFT A20

35 saniyede hızlı hazırlanan ürethan ürünü tırnak pedi maddesi olarak kullanıldı, tırnak bakımçılarına ped ve taban arasına kirlerin girmesini engelleme avantajını sunar. Süper Yumuşak Shupad ürünü ile birlikte kullanımını öneririz.

ÖZELLİKLERİ:

- Yumuşak dolgu / şok emici maddeli
- Soğuk hava koşullarında yumuşak kalır
- Tırnak tabanına yapışır
- 35 saniye hazırlama süresi
- Hazırlanırken ısınır (hassas ayaklarda Shufill silikonunun kullanımı önerilir)

STANDARD UYGULAMA:

- Ped ile

ALTERNATIF UYGULAMA:


- Yer seviyesine ağ gözü dolgu ile

SOFT İLE MESH



BÜTÜN
TAMPONLAMA
ÖZELLİKLERİNİ
İZLEYİN



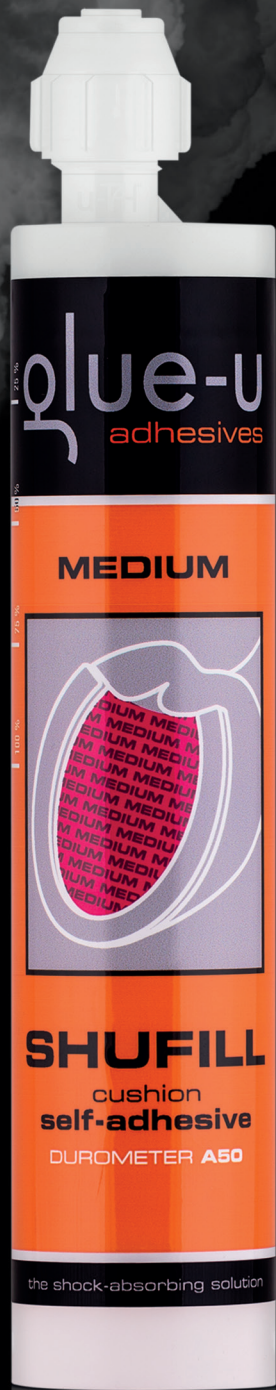

SHUFILL CUSHION

ORTA A20

35 saniye hazırlama surely şok emici ped maddesi sıklıkla atları desteklemek için kullanılır.Ped yada ağ gözü ile kullanılabilir. Bununla birlikte en iyi sonuç için ağ gözü ile kullanımı önerilir.

ÖZELLİKLERİ:

- Orta sertlikte şok emici maddeli
- Nallama periyodunda soğuk havalarda bile stabil kalır
- Tırnak tabanına yapışır
- 35 saniye hazırlama süresi
- Hazırlanırken ısınır (hassas ayaklarda Shufill silikonunun kullanımı önerilir)

STANDARD UYGULAMA:

- Ped ile

ALTERNATIF UYGULAMA:

- Ağ gözü ile

AĞ GÖZÜ İLE VE KÖPÜK PED




BU UYGULAMA
VİDEOSUNA
BAKIN





glue-u
adhesives

FIRM

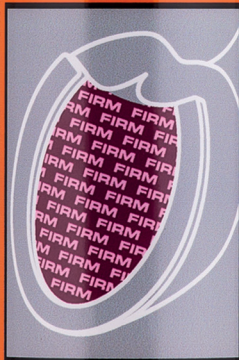

SHUFILL

cushion
self-adhesive

DUROMETER A60

the shock-absorbing solution

the shock-absorbing solution

self-adhesive
cushion

SHUFILL



SHUFILL CUSHION

ORTA A20

Shufill Cushion Firm nallı yada nalsız atları destekleyici ped maddesi. Tırnak duvarlarındaki baskıyı dindirir ve ökçe gelişimini destekler.

ÖZELLİKLERİ:

- Sert destekleme ped maddesi
- Nallama aralığında soğuk havalarda bile stabil kalır
- Tırnak tabanına yapışır
- 35 saniye hazırlama süresi
- Hazırlama sürecinde ısınır

STANDARD UYGULAMA:

- Ped ile

ALTERNATIF UYGULAMA:

- Ağ gözü ile

KORUYUCU TABAKA OLARAK



SHUFILL SILICONES

Katı ama yumuřak silikon ped madesinin 5 versiyonu vardır A10 (mavi) – A20 (yeřil) – A20 (řeffaf) – A30 (mor) – A40 (sarı). 250cc kartuřlar standart silikon tabancalarına uymaktadır. Koruma, řokemme ve tırnak tabanını desteklemeyi sunar. Daima Shufill Silikonlarını Shupads ile kullanınız! Shufill Silikonları asit, kimyasaliçermez ve bu nedenle yara tedavileri için çok uygundur. Hazırlama Süresi 4 dakikadır, hava kořullarına baęlı olarak deęiřebilir. Shufill Silikonlarını kullanmadan önce ısıtmak önemli ölçüde hazırlama süresini hızlandırır. Sıcaklık ve nem bu ürünün performansını etkileyebilir.



SOFT**A10**

Ürün Numarası	210105250
Tanım	Aşırı Decede Yumuşak Silikon ped madde
Kartuş	250cc
Renk	Mavi
Ayarlama Zamanı	4 dakika (ısıtıldığında 2 dakika)

MEDIUM-SOFT**A20**

Ürün Numarası	210107250
Tanım	Çok Yumuşak Silikon ped madde
Kartuş	250cc
Renk	Yeşil
Ayarlama Zamanı	4 dakika (ısıtıldığında 2 dakika)

MEDIUM-SOFT**A20**

Ürün Numarası	210103250
Tanım	Çok Yumuşak Silikon ped madde
Kartuş	250cc
Renk	Şeffaf
Ayarlama Zamanı	4 dakika (ısıtıldığında 2 dakika)

MEDIUM**A30**

Ürün Numarası	210109250
Tanım	Yumuşak Silikon şok emici ped madde
Kartuş	250cc
Renk	Mor
Ayarlama Zamanı	4 dakika (ısıtıldığında 2 dakika)


FIRM**A40**

Ürün Numarası	210104250
Tanım	Orta Sert Silikon destekleyici ped madde
Kartuş	250cc
Renk	San
Ayarlama Zamanı	4 dakika (ısıtıldığında 2 dakika)



glue-u
adhesives

SOFT

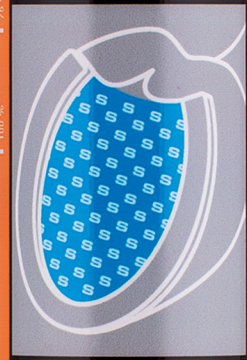

SHUFILL
SILICONES

DUROMETER A10

the shock-absorbing solution

the shock-absorbing solution
SILICONES
SHUFILL

SHUFILL CUSHION

A10

Silikon ürün tırnak pedi olarak kullanılır, tırnak bakımıcısına kirin tırnak tabanı ve ped arasına girmesine engel olma avantajını sunar. Sadece dolgu olarak da kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ:

- Çok yumuşak dolgu maddesi
- Soğuk hava koşullarında yumuşak kalır
- Tırnak tabanına yapışmaz
- 4 dakika hazırlama süresi
- Vücut sıcaklığı derecesinde ısıtıldığında hazırlama süresi 2 dakikaya düşer
- Hazırlama sürecinde düşük sıcaklığını korur
- Asitsizdir

STANDARD UYGULAMA:

- Daima Ped ile

FARKLI YOĞUNLUKLAR

A10 mavi dolgu için +

A20 yeşil hafif şok emme için



ŞU UYGULAMA
VIDEOSUNU
İNCELEYİNİZ





glue-u
adhesives

MEDIUM SOFT



SHUFILL
SILICONES


DUROMETER A20

the shock-absorbing solution

the shock-absorbing solution

SILICONES

SHUFILL

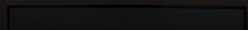

SHUFILL CUSHION

A20

Silikon ürün tırnak ped maddesi olarak kullanılır, tırnak bakımıcısına taban ve ped arasına kir girmesini engelleme avantajını sunar. Dolgu yada yumuşak şok emici olarak kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ:

- Yumuşak Dolgu / hafif şok emici madde
- Yapışmaz
- Soğuk hava koşullarında yumuşak kalır
- 4 dakika hazırlama süresi (Isıtıldığında 2 dakika)
- Hazırlama sürecinde düşük sıcaklığını korur
- Asitsizdir

STANDARD UYGULAMA:

- Ped ile

SHUPAD İLE TAM DOLDURMA FROG (İKİ BAŞLI KAS) DESTEĞİ




OLASI
UYGULAMALARI
GÖRÜN





glue-u
adhesives

MEDIUM SOFT

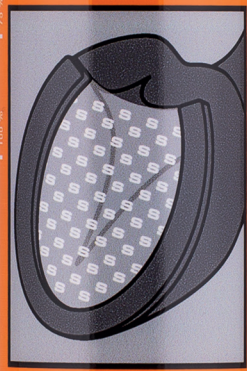

SHUFILL
SILICONES
TRANSPARENT
DUROMETER A20

the shock-absorbing solution

the shock-absorbing solution
SILICONES
SHUFILL

SHUFILL CUSHION

A20

Şeffaf Silikon ürün tırnak ped maddesi olarak kullanılır, tırnak bakımıcısına taban ve ped arasına kir girmesini engelleme avantajını sunar. Dolgu yada yumuşak şok emici olarak kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ:

- Yumuşak Dolgu / hafif şok emici madde
- Yapışmaz
- Soğuk hava koşullarında yumuşak kalır
- 4 dakika hazırlama süresi (Isıtıldığında 2 dakika)
- Hazırlama sürecinde düşük sıcaklığını korur
- Asitsizdir

STANDARD UYGULAMA:


- Daima Ped ile

SHUPAD İLE TAM DOLDURMA



BÜTÜN SİLİKON
ÖZELLİKLERİNE
BAKINIZ



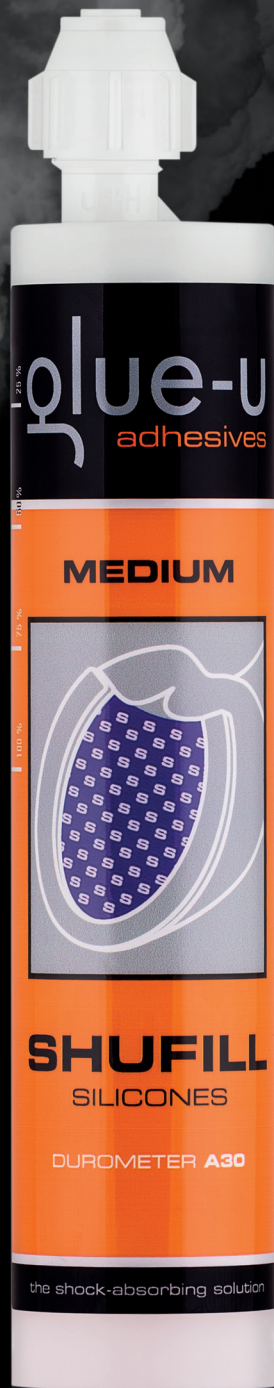

SHUFILL CUSHION

A30

Bu silikon tırnak pedi çoğunlukla şok emici olarak kullanılmaktadır. Atlara destek olarak daha fazla konfor sunar ve aynı zamanda bacağı yaralanmış atların stresini azaltır.

ÖZELLİKLERİ:


- Orta şok emici madde
- Yapışmaz
- Soğuk hava koşullarında yumuşak kalır
- 4 dakika hazırlama süresi (Isıtıldığında 2 dakika)
- Hazırlama sürecinde düşük sıcaklığını korur
- Asitsizdir

STANDARD UYGULAMA:

- Daima Ped ile

SHUPAD (TIRNAK PEDİ) İLE TAM DOLUM



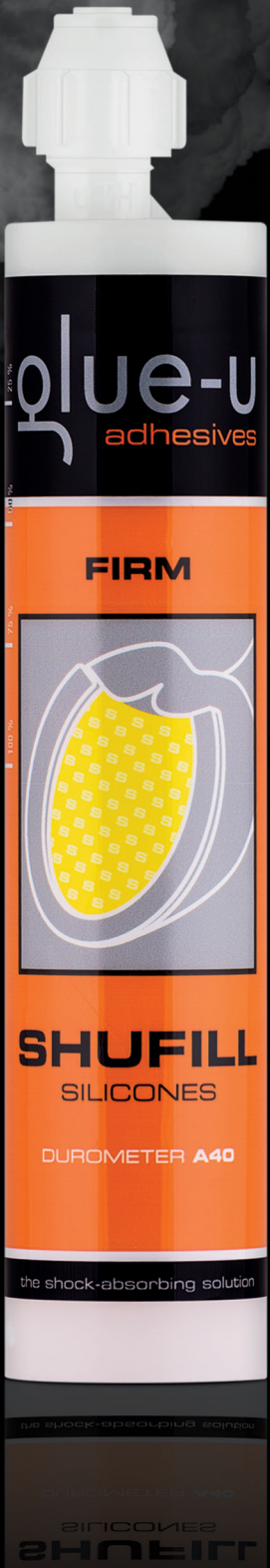

SHUFILL CUSHION

A40

Sert tırnak pedi atlara en iyi desteęi sunar. Őok emme özellięi zıplayan atlara ve sert zeminlerde at sürmede en iyi konforu verir.

ÖZELLİKLERİ:

- Orta Őok emici madde
- Yapışmaz
- Soęuk hava koşullarında yumuşak kalır
- 4 dakika hazırlama süresi (Isıtıldığında 2 dakika)
- Hazırlama sürecinde düşük sıcaklığını korur
- Asitsizdir

STANDARD UYGULAMA:

- Daima Ped ile

SHUPAD (TIRNAK PEDI) İLE EN İYİ DESTEK



SHUFILL

TIRNAK PAKETİ

Hafif tırnak dolgusu şok emici ve koruyucu. Elle karıştırılır. 2x660 gr / yada 2x2.5 kg / ve durometere (plastik sertlik ölçer) A15 (mavi) – A25 (pembe) – A35 (yeşil). Özellikle tırnak içi koruma için ve güneş yüzeyi. Kolayca karıştırılabilir ve elle şekil verilebilir. Shufill Tırnak paketi rahatsız edici tahriş edici değildir. Kolay kesilebilir olması onu birçok uygulama durumlarına uygun kılar. Shufill Tırnak Paketi asit ve kimyasal içermez ve bu nedenle yara bakımına uygundur. *Sıcaklık ve nem bu ürünün performansını etkileyebilir. Shufill tırnak paketini ısıtmak hazırlama süresini önemli ölçüde hızlandırır.*



EXTRA SOFT A15

Ürün Numarası	250105660 (660 gr) / 250105025 (2500 gr)
Tanım	Extra Yumuşak Silikon ped madde elle karıştırılabilir
Kartuş	2x660 gr/1.5 lb / 2x2500 gr/5.5 lb
Renk	Mavi
Ayarlama Zamanı	4-5 dakika (Isıtılırsa 2-3 dakika)

SOFT A25

Ürün Numarası	250106660 (660 gr) / 250106025 (2500 gr)
Tanım	Yumuşak Silikon ped madde elle karıştırılabilir
Kartuş	2x660 gr/1.5 lb / 2x2500 gr/5.5 lb
Renk	Pembe
Ayarlama Zamanı	4-5 dakika (Isıtılırsa 2-3 dakika)

MEDIUM A35

Ürün Numarası	250107660 (660 gr) / 250107025 (2500 gr)
Tanım	Orta Silikon ped madde elle karıştırılabilir
Kartuş	2x660 gr/1.5 lb / 2x2500 gr/5.5 lb
Renk	Yeşil
Ayarlama Zamanı	4-5 dakika (Isıtılırsa 2-3 dakika)



SHUFILL CUSHION

SUPER SOFT A20

Extra yumuřak etkili madde elle karıřtırılabilir. ođunlukla dolgu iin kullanılır, hafif řok emici sadece atlara daha fazla konfor vermek iindir. rn ok yumuřak olduđu iin btn tabanı dolgu yapmak mmkndr. Laminitis yada diđer ařırı derecede ađrılı olan ayak tabanının izole edilmesi gereken durumlarda, nal ve ped uygulandıktan sonra sertleřtikten sonra l malzemesi kesilebilir.

ZELLİKLERİ:

- ok yumuřak baskı maddesi
- Non Toksik
- Cilt Dostu (Rahatsız etmez yada alerjik reaksiyona neden olmaz)
- Hazırlama Zamanı 4-5 dakika (Isıtıldıđında 2-3 dakika)
- Elle kolayca karıřtırılıp Őekil verilebilir.
- Tırnak tabanına herhangi bir tıbbi uygulama ile birlikte kullanılabilir

STANDARD UYGULAMA:

- Daima Ped ile

ALTERNATİF UYGULAMA:

- Tıbbi tabak

MEDİKAL PLAKA



UYGULAMA
VIDEOSUNU
İNCELEYİNİZ





SHUFILL CUSHION

SUPER SOFT A20

Yumuşak baskı maddesi ve bu ürün çeşitliliğinde en çok kullanılan üründür. Tabana yada local çift başlı kas (frog) kalp şekilli nal kombinasyon örneği için mükemmel şok emmiciliği sağlar.

ÖZELLİKLERİ:

- Yumuşak baskı maddesi
- Non Toksik
- Cilt Dostu (Rahatsız etmez yada alerjik reaksiyona neden olmaz)
- Hazırlama Zamanı 4-5 dakika (Isıtıldığında 2-3 dakika)
- Elle kolayca karıştırılıp şekil verilebilir.
- Tırnak tabanına herhangi bir tıbbi uygulama ile birlikte kullanılabilir

STANDARD UYGULAMA:

- Ped ile tam dolum

ALTERNATIF UYGULAMA:

- Lokal olarak nal çizgilerine (Hearthbar, Straightbar)

PEDLERLE TAM DOLUM



OLASI
UYGULAMALARI
GÖRÜN





SHUFILL CUSHION

SUPER SOFT A20

Tırnağı tamamen yada çift başlı kas (frog) local olarak desteklemede en iyi ortağınız. Sert son ürün sayesinde her türden barsho (nal) veya ped ile kullanımı çok kolaydır.

ÖZELLİKLERİ:

- Katı baskı maddesi
- Non Toksik
- Cilt Dostu (Rahatsız etmez yada alerjik reaksiyona neden olmaz)
- Hazırlama Zamanı 4-5 dakika (Isıtıldığında 2-3 dakika)
- Elle kolayca karıştırılıp şekil verilebilir.
- Tırnak tabanına herhangi bir tıbbi uygulama ile birlikte kullanılabilir

STANDARD UYGULAMA:

- Ped ile tam dolum

ALTERNATIF UYGULAMA:

- Lokal olarak nal çizgilerine (Hearthbar, Straightbar)

PEDLERLE TAM DOLUM



BÜTÜN
TIRNAK DOLGU
ÖZELLİKLERİNİ
İZLEYİNİZ



SHUFIX

HIZLI SET

Tayların ayaklarına ve plastik ayakkabı ile uzantı yapmak için Ürethan yapışkan çok uygundur. Aynı zamanda toynakları yeniden inşa etme yada rötuş yapmak için, orta/yanal düzeltme yapmak için ve küçük tırnak tamiri için uygundur. Tırnak temiz ve özellikle de kuru olmalıdır. 250cc kartuş standart silikon makinalarına uyar. *Kürlenme zamanı 30 – 60 saniye, yaklaşık 5 dakika sonar çalışılabilir. Sıcaklık ve nem bu ürünün performansını etkileyebilir.*



BLACK

Ürün Numarası	150102250
Tanım	<i>İAnında çatlak onarımı hızlı hazırlama / Tay uzantıları üzerinde</i>
Kartuş	250cc
Renk	Siyah
Ayarlama Zamanı	30-60 saniye

WHITE

Ürün Numarası	150101250
Tanım	<i>Anında çatlak onarımı hızlı hazırlama / Tay uzantıları üzerinde</i>
Kartuş	250cc
Renk	Beyaz
Ayarlama Zamanı	30-60 saniye



SHUFIX BLACK /WHITE

Shufix Tay ayaklarında ve özel plastic ayakkabılar için uygun ultra hızlı at yapıştırıcısıdır. Aynı zamanda toynakları yeniden inşa etme yada rötus yapmak için, orta/yanal düzeltme yapmak için ve küçük tırnak tamiri için uygundur. Ağır kış şartlarında aynı zamanda en çok kullanılan nal yapışkanıdır. Bu ürethan ürünüdür, tırnak Shufix'i uygulamadan önce kurutulmalı ve temizlenmelidir.

ÖZELLİKLERİ:

- Siyah ve beyaz çeşitleri vardır
- Super hızlı hazırlama süresi (30 - 60 saniye)
- Törpülemesi kolaydır
- Sert ama esnek maddedir
- Hazırlandığı süre içinde yüksek ısı (+/- 1 cm / 0.4" konar banttın kalın)

STANDARD UYGULAMA:

- Tırnak ilaveleri

ALTERNATIF UYGULAMA:

- Nal yapıştırma
- Ağır kış şartlarında nal yapıştırma
- Geçici koruma
- Topuk kaldırma

HOOF UZATMA



ÇATLAK
TAMİRATI
VİDEOSU



SHUFIT

NAL ÜZERİ YAPISTIRMA

Atayakkabılarını yapıştırmak için küçük akrilik yapıştırıcı ve tırnak duvarı tamiratı. 150cc and 420cc siyah ve bej renkleri mevcuttur. 150 cc kartuş standart uygulama tabancalarına yada Glue-U uygulama tabancasıyla, 420 cc kartuş sadece özel bir uygulama tabancasıyla kullanılabilir. Demir, Alüminyum hatta ürethan ayakkabıları bile yapıştırır. Geniş çatlak tamiratlarında ve tırnak ekleri için uygundur. İlk hazırlama süresi 90-120 saniye (açık zaman). Ağırlığa dayanma 4-5 dakika (Soğuk hava şartlarında bile). Sıcaklık ve nem bu ürünün performansını etkileyebilir. Shufit'i kullanmadan önce ısıtmak ürünün yapışmasını önemli ölçüde hızlandırır.



BLACK

Ürün Numarası	100102150 / 100102420
Tanım	Nal yapıştırma / Tırnak tamirati
Kartuş	150cc / 420cc
Renk	Siyah
Ayarlama Zamanı	4-6 dakika / 7-8 dakika ağırlığa dayanma süresi Isıtıldığında; 120-180 saniye (2-3 dakika)

BEIGE

Ürün Numarası	100114150 / 100114420
Tanım	Nal yapıştırma / Tırnak tamirati
Kartuş	150cc / 420cc
Renk	Beyaz
Ayarlama Zamanı	4-6 dakika / 7-8 dakika ağırlığa dayanma süresi Isıtıldığında; 120-180 saniye (2-3 dakika)



SHUFILL CUSHION BLACK / BEIGE

Shufit akrilik yapıştırıcı at sektöründe kullanılan en çok çok yönlü yapıştırıcıdır. Her tür nalda yada en küçükten en büyük çatlak tamiratları, en büyük tırnak duvarı problemlerine kadar kullanılabilen bir üründür. En büyük özelliklerinden bir tanesi de elle yada mikser ucuyla kullanılabilir ve karıştırılabilir olmasıdır. Shufit hazırlama sürecinde bir yerden başka bir yere taşınabilir. Örneğin tırnakta fazla sürülen bir yerden yapıştırıcıyı alıp, fazladan yapıştırıcıya ihtiyaç olan bir yere taşıyabilirsiniz.

ÖZELLİKLERİ:

- Bej ve Siyah renkleri mevcuttur
- 150cc kartuş standart uygulama tabancasına uygundur
- Elle yada kartuş ucuyla karıştırılabilir
- Çok yüksek yapışma gücüne sahiptir
- Törpülemesi kolaydır
- Sert fakat elastic bir maddedir
- Yapışmasını hızlandırmak için ısıtmak uygundur

STANDARD UYGULAMA:

- Nal yapıştırma

ALTERNATIF UYGULAMA:

- Çatlak tamirati
- Tırnak tamirati

YAPIŞTIRMAK GLUSHU



UYGULAMA
VIDEOSUNU
İNCELEYİNİZ



PRE FIX (ÖN EK) SUPER YAPISTIRICI

Pre fix, GluShu'yu ayağa yapıştırmak ve onu yerinde tutmak için kullanılan üründür. 2 bileşenli super yapıştırıcı GluShu'yu saniyeler içinde ayağa yapıştırır. Bu yapıştırıcı ile ayak yere basarken uygulama yapıp yapıştırma yapabilmek içindir. Laminitis yada yaralanmalarda huysuz ve üç ayağı üzerinde durmayan atlar için çok kullanışlıdır. *Pre fix yapısal bir yapıştırıcı değildir. GluShu'yu yapışkan kürlenmesiye kadar geçici olarak koyduğunuz yerde tutmaya yarar. Bir bileşen spreydir, diğer bileşen de sıkma şişesinin içindeki şeffaf jeldir.*



ACTIVATOR

Ürün Numarası	490100200
Tanım	<i>Pre glue Glushu kombinasyonu içinde Pre fix CA glue</i>
Kartuş	200cc / 6.76 oz
Renk	<i>Şeffaf</i>
Ayarlama Zamanı	15 saniye

CA GLUE

Ürün Numarası	490101100
Tanım	<i>Pre glue Glushu kombinasyonu içinde Pre fix Activator</i>
Kartuş	150 gr / 5.29 oz
Renk	<i>Şeffaf</i>
Ayarlama Zamanı	15 saniye



PRE FIX

Pre fix iki adımda kullanılır. Önce uygun hale getirilmiş ve şekil verilmiş GluShu ve yapıştırıcı için hazırsınız, Pre Fix yapıştırıcıyı videodaki uygulama talimatına göre uygulayın ve ayağı Shufit ile yapıştırmak için aşağıya bırakın ve Glushu hemen tırnağa yapışır.

ÖZELLİKLERİ:

- 15 saniye hızlı hazırlanan superglue
- 2 bileşken birbiriyle teması halinde hemen yapışır

STANDARD UYGULAMA:

- Sadece Glushu nallarına ön uygulama içindir

PRE FIX GLUSHU



ÇATLAK
TAMİRATI
VIDEOSU



KARTUSLAR

SAKLAMA KOSULLARI

YAPILMASI GEREKENLER

Donmaktan koruyunuz.

Shufit'i yaklaşık olarak 10 °C / 40 °F tutunuz.

Poly-urethan and silikonları yaklaşık olarak 15°C / 60°F tutunuz.

Ürünleri kuru yerde muhafaza ediniz.

"İlk giren ilk çıkar" hangi ürün önce alındıysa önce o ürünü kullanınız.

Kartuşları dik tutunuz.

Karıştırma mikserlerini kapak olarak kullanabilirsiniz (kuruma olmaması için)

YAPILMAMASI GEREKENLER

Ürünleri sürekli değişken sıcaklıklara maruz bırakmak.

Kullanılmış kartuşları stoğa geri koymak.

Kartuşları birkaç dakikalığına açmak.

Kartuşların ağzını kullandıktan sonra açık bırakmak.

KULLANIM

YAPILMASI GEREKENLER

YAPILMASI GEREKENLER

İki bileşkenli olanların seviyelerini kontrol ediniz.

İki bileşkenli ürünlerde iki kanalın açık olduğundan emin olunuz.

Güncel kullanımdan önce,kartuşu takmadan önce biraz sıkınız ve iki kanaldan aynı zamanda bileşkenlerin geldiğinden ve mikserde karıştığından emin olunuz.

Tırnağa uygulamadan önce uygun oranda karışıma dikkat ediniz.

Havadar ve açık alanda uygulayınız.

Koruyucu elbise + eldiven giyiniz.

Tırnağı normal olarak düzeltiniz. Tırnak düzeltme işinizin en önemli kısmıdır.

Yapıştırma süresince, ayağı yapışkan tamamen kürlenene kadar havada tutunuz.(Yapışma zamanı ısı ve neme bağlıdır.)

YAPILMAMASI GEREKENLER

Ürünü direkt olarak koklamayın ve solumayınız.

Cilt ile temasta,ürün alerjik reaksiyona sebep verebilir.

Yaralarda ve açık deride kullanmayınız.


Gereğinden fazla yapıştırıcı kullanmak. Daha çok yapıştırıcı daha fazla ısı.

Yapıştırıcıyı tırnak tabanına ve Frog'a uygulamadan kaçınınız.

Sıcak havalarda kartuşu ısıtmayınız. Hava sıcaklığı yeter.

SHUPADS

Ölçü malzemeleri ve silikonlar için temel. Bu şeffaf pedlerin 4 çeşidi bulunmaktadır.s. M ve XL düz, L düz and frog destekli takoz. Pedleri kolayca kesip her tırnağa uygun hale getirebilirsiniz.İhtiyacınız olan ölçüye bizim ölçü skalamızdan bakıp belirleyebilirsiniz. Yüksek kaliteli urethan madde ayak mekanizmasını kısıtlamamanızı sağlar. *Tecrübeler göstermiştir ki, Glue-U Shupad'ler uzun süreli periyotlar için kalıcı bir üründür. Her Shupad kendiliğinden kapanan enjeksiyon delikli olarak dizayn edilmiştir. Bu nedenle tırnakları doldurmak Glue-U Shupad'leri ile kolay hale getirilmiştir.*

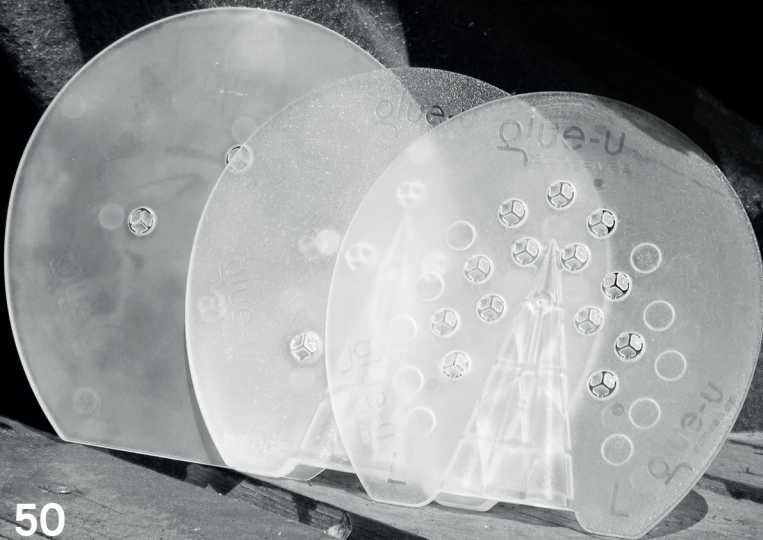

FLAT FLEX

Ürün Numarası	810050010
Tanım	Düz ped 4 doldurma delikli
Ses	10 parça (Medium) Orta
Renk	Şeffaf
Boyutlari	150 x 155 mm 5.9 x 6.1"

FROG SUPPORT FLEX


Ürün Numarası	810060010
Tanım	Düz ped çoklu doldurma delikli ve frog destekli
Ses	10 parça (Large) Geniş
Renk	Şeffaf
Boyutlari	165 x 165 mm 6.5 x 6.5"

FLAT FLEX

Ürün Numarası	810070010
Tanım	Düz ped 4 doldurma delikli
Ses	10 parça (Extra Large) Ekstra Geniş
Renk	Şeffaf
Boyutlari	180 x 180 mm 7.08 x 7.08"

WEDGE

Ürün Numarası	810060006
Tanım	Takozlu ped çoklu doldurma delikli ve frog desteklifrog support
Ses	6 parça (Large) Geniş
Renk	Şeffaf
Boyutlari	165 x 165 mm 6.5 x 6.5" 3° wedge; 10 mm 0.4"

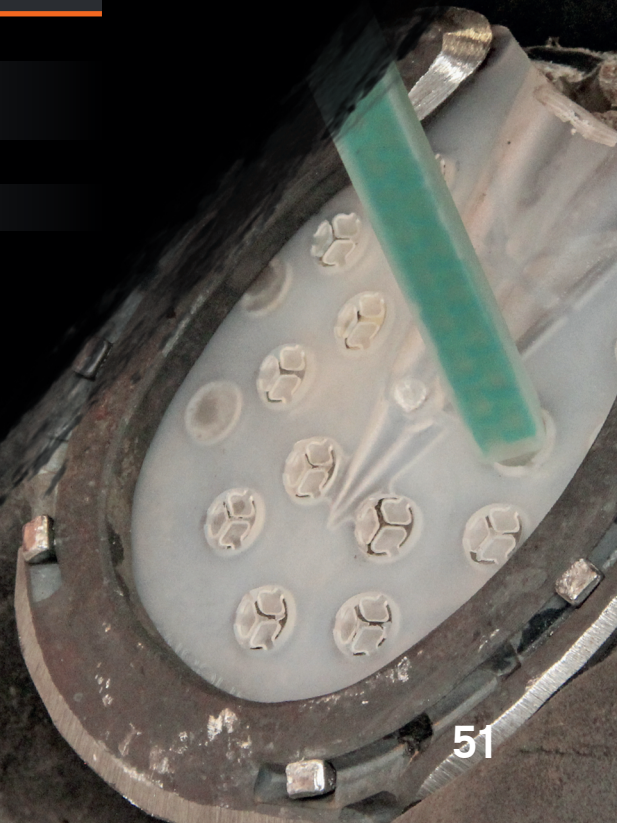

AKSESUARLAR

ALETLER



ADAPTÖR

Ürün Numarası	490002001
Tanım	150cc Shufit'e normalde uygun Uygulama tabancası
Ses	1 pc



SHUFIT 150CC UYGULAMA TABANCASI

Numarası	827100150
Tanım	Uygulama tabancası
Ses	1 pc




420 CC UYGULAMA TABANCASI

Numarası	827100420
Tanım	Uygulama tabancası
Ses	1 pc



EVRENSEL UYGULAMA TABANCASI

Numarası	820000000
Tanım	Uygulama tabancası
Ses	1 pc

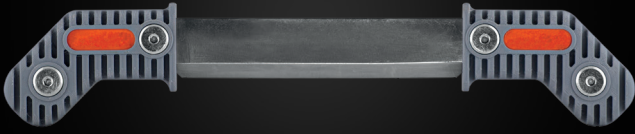

GLUSHU ÇIKARMA BIÇAĞI

Numarası	490000002
Tanım	GluShu çıkarma bıçağı
Ses	1 pc




KENDİNDEN YAPIŞKANLI KÖPÜK PANO

Numarası	810001020
Tanım	Yapışkanlı köpük pano 199 x 199 mm / 7.85 x 7.85"
Ses	20 parça



SERT AMBALAJ FOLYOSU

Numarası	890503001
Tanım	Tırnak Sargı Folyosu
Ses	1 pc

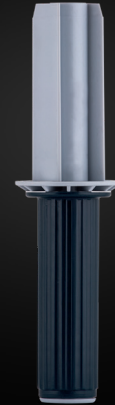


ELLE SARMA FOLYO TUTUCU

Numarası	890512001
Tanım	Tırnak sargı folyo tutucu
Ses	1 pc



ISITICI 150CC & 250CC / 420CC

Numarası	890312150 / 890312420
Tanım	Yapıştırıcı ısıtma kutusu 12V & 220V
Ses	1 pc

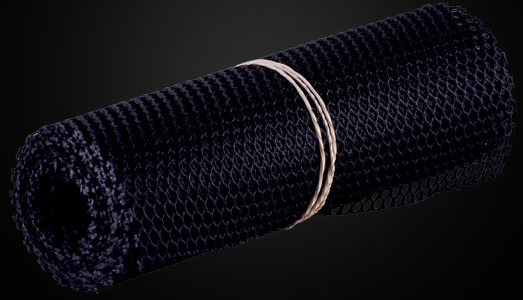

MESH

Numarası	892002010
Tanım	Mesh for Shufill (Tampon) için ağ 2500 x 200 mm / 98.5 x 7.9"
Ses	1 pc




MIXING TIP

Numarası	610007010
Tanım	Yeşil kare mikser
Ses	10 pcs




SHUCLEANER

Numarası	490000750
Tanım	Asetonsuz Tırnak Temizleyici
Ses	750cc

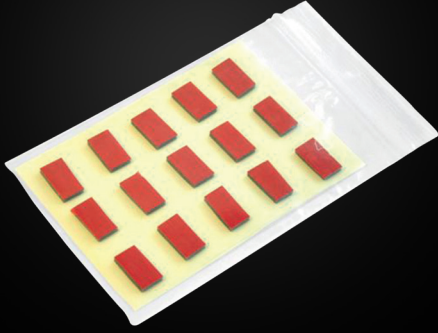

SPACER TAPE

Numarası	891002010
Tanım	Special tape to keep space between the hoof and horseshoe
Ses	15 pcs

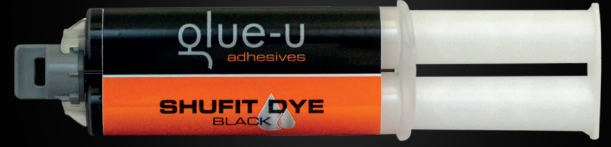


SHUFIT DYE

Numarası	891002001
Tanım	Black pigment to dye Shuffit beige to black
Ses	1 pc



DÜZELTME PLAKALARI

Numarası	420290075 / 420290085 / 420290095
Tanım	Mini Glushu düzeltme plakaları her türlü ekler için
Ses	2 pcs

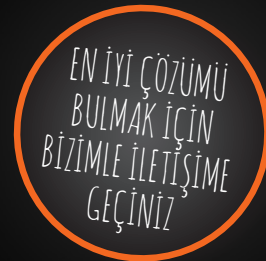

GLUSHU & MINI GLUSHU İÇİN EKLER

Numarası	Bütün ölçüleri mevcuttur
Tanım	Frog destek, takozlar, Glushu'ya uyan kapalı pedler
Ses	2 pcs

GLUSHU

NAL YAPISTIRMA

Glushu özel olarak dizayn edilmiş alüminyum nalları yapıştırmak için esnek kelepçe yapışkan. Bu ata hafiflik verir, tırnak desteklenir, ayağın tamponlanması at ayağındaki stresi ve zedelenmeyi giderir ve uygulaması kolaydır. GLUSHU'lar zararlı değildirler, tamamen nallama esnasında oluşabilecek tırnak yaralanma risklerini giderir. Kolay ve hızlı uygulama. Çift yada kit olarak alınabilir. *Aktif davranan yapıştırıcı kullanır. Özellikle GluShu için dizayn edilen Shufit yapıştırıcı kullanmanızı önemle rica ederiz. Manşet, ayakkabının aşamalı olarak yapıştırılmasına izin verir. Özel bir ekipman gerektirmez. Kolay boyutlandırma sistemi & geniş boyut seçenekleri. Değişirme gerektirmez. Zayıf beyaz çizgi yada kötü tırnak duvarı durumlarında nallama esnasında stress riskini ortadan kaldırır. Ayağa tampon görevi görür. Manşet, topikal ilacı yerinde tutmak için kullanılabilir. Tırnak duvarının daha fazla hasar görmesini önler.*



GLUSHU KİTLERİ & ÇİFTLERİ

Bir çift Glushus'u yapıştırmak için gereken tüm temel ekipmanları içeren kitler;

1x GluShu Çift
1x Shufit 150cc
1x Adaptör
4x Mixer

KIT ÖLÇÜSÜ	Numarası
4x0 Ön	410290040
3x0 Ön	410290030
00 Ön	410290020
0 Ön	410290010
1 Ön	410290001
2 Ön	410290002
3 Ön	410290003
4 Ön	410290004
2x0 Arka	410291020
0 Arka	410291010
1 Arka	410291001
2 Arka	410291002
3 Arka	410291003

ÇİFT ÖLÇÜSÜ	Numarası
4x0 Ön	400290040
3x0 Ön	400290030
00 Ön	400290020
0 Ön	400290010
1 Ön	400290001
2 Ön	400290002
3 Ön	400290003
4 Ön	400290004
2x0 Arka	400291020
0 Arka	400291010
1 Arka	400291001
2 Arka	400291002
3 Arka	400291003

MINI GLUSHU

TAY AYAKKABISINALI

Mini Glushu, hem ön hem de arka ayaklar için geçerli olan standart Glushu'nun daha küçük bir versiyonudur.. Bu yapıştırıcı Shetlant midillileri ve tayarlar için kullanımı kolaydır. Bir çok çeşidi olan çok yönlü nal. Mini Glushu uzatma ayakları yada ekleri ile kolayca kombine edilebilir.

Kullanıcılar için sadece Mini Glushuları uygulama kitlerinde ihtiyaç duyacağınız ürünler bulunan bir 5li set.

Uygulama Kiti;
1x Shufit 150cc
1x Adaptör
1x Pre fix set
10x Kartuş

KIT ÖLÇÜSÜ	Numarası
75 mm / 2.95"	400290075
85 mm / 3.35"	400290085
95 mm / 3.74"	400290095

ÇİFT ÖLÇÜSÜ	Numarası
Uygulama Kiti	410290000
Düzeltilme plakaları	420290075 420290085 420290095

UYGULAMALAR

Glushu, normal elik / alüminyum ayakkabılara kıyasla ok benzer bir kullanıma sahip yapıştırmalı bir ayakkabıdırivilemenin zor olduėu, imkansız olduėu veya istenmediėi her durumda uygulanabilir. Glushu, tırnak duvarına yapıştıırılmıştır. Bu, toynak mekanizmasının sınırlandırılmasının küçük olduėu anlamına gelir. Glushu, Shufill Hoof ambalaj veya Silikonlar ile birlikte tüm Glue-U Shufill tamponları veya Glushu uçları ile birleřtirilebilir. Glushu kolayca yeniden řekillendirilebilir, raspalanabilir vb.

STANDARD UYGULAMA:

Glushu ön veya arka tam ayakkabılar. Shufill Cushion veya ekler ile kombine edilmesi gerektiėinde.

SAYFADAKI UYGULAMA VIDEO LINKINE BAKINIZ - PAGE 43



DEĐİŐIKLİK
TALİMAT
VİDEOSU





ALTERNATIF UYGULAMA:

Glushu arka nal + ön manşet açık burunlu ayakkabı olarak kullanmak için kesilmiş. Topuklar ayrıca daha iyi devrilme için yuvarlak şekle getirilebilir.

ALTERNATIF UYGULAMA:

Glushu arka nal + ön manşet açık burunlu ayakkabı olarak kullanmak için kesilmiş. Topuklar ayrıca daha iyi devrilme için yuvarlak şekle getirilebilir.



ALTERNATIF UYGULAMA:

Glushu, ped malzemeleriyle doldurmak için ağ veya ped ile kombine edilmiştir. Uygulamadan hemen önce file veya tampon yapıştırılmalıdır.



MINI GLUSHU UZATMA TABAKALARI:

Mini Glushu, her türlü tırnak standı düzeltmesi için yapıştırılmadan önce uzatma plakaları ile ayarlanmıştır.



MINI GLUSHU UYGULAMA:

Mini Glushu, tabandaki baskı mümkün olduğunca azaltmak için bir ped ve Shufill Hoof paketiyle birleştirildi. Hasarlı ayak parmağı, günlük dezenfeksiyon ve temizliği sağlamak için açık tutulur.

GLITTER GLUSHU UYGULAMA:

Parıltılı Glushu yapma isteğini aldığın o an. Bu sadece parıltı isteğine cevap vermeyi sevenler için özel bir Glushu. Anika Ridgeway, Glue-U Shufit'in istenen görünümü nasıl değiştirileceğini gösteriyor.



Glue-U Adhesives BV

Droogdokkeneiland 8
5026SR Tilburg
The Netherlands

Tel. +31 (0)13 54 53 118

E-mail: sales@glue-u.com

Website: www.glue-u.com