


VORBEREITUNG


GLUSHU

Sie können das Hufeisen so umformen, wie Sie es mit einem normalen Aluminium-Hufeisen tun würden.

Eine gute Hufvorbereitung ist entscheidend dafür, dass das Hufeisen für den gesamten Trimmzyklus von 6-8 Wochen sicher bleibt.

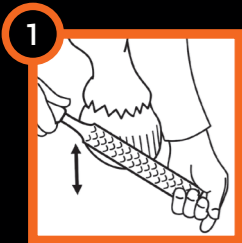

1 Schneiden und raspeln Sie den Huf wie gewohnt. Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Hufes, in die der Glushu passt, geraspelt und staubfrei sind (einschließlich der Fersen).

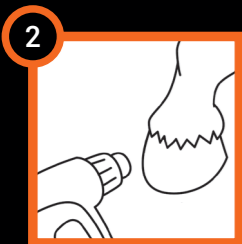

2 Stellen Sie sicher, dass die Hufe trocken sind. Die meisten Fehlklebungen sind auf Schmutz oder Feuchtigkeit im Huf zurückzuführen.




3 Wenn Sie Shufit Glue verwenden, drücken Sie vor der Verwendung eine kleine Menge Klebstoff aus, bis er dunkelgrau ist.


Stellen Sie sicher, dass der Kleber warm ist (25 °C - 30 °C Grad).

ENTFERNEN


DRAWKNIFE

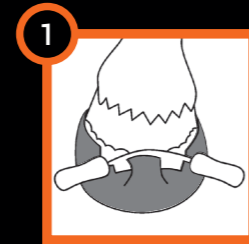

1 Mit einem Drawknife die Manschette vom Huf abschneiden, indem Sie entlang der Klebelinie nach unten streichen.

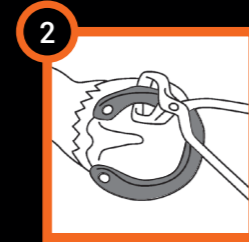

2 Mit Zangen das Metall-Hufeisen vom Huf abschneiden.

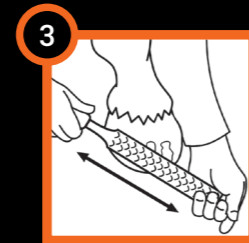

3 Entfernen Sie den restlichen Kleber oder die Manschette mit einer Raspel.

GLUSHU

KLEBESCHUHE



Eine flexible Manschette, die mit einem speziell entwickelten Aluminiumhufeisen

verbunden ist. Dies gibt dem Pferd einen leichten, hufstützenden, gepolsterten Huf, der jeglichen Stress oder Schäden am Huf des Pferdes beseitigt.

WEITERE INNOVATIVE PRODUKTE

KONTAKT

GLUE-U® ADHESIVES

Glue-U Adhesives BV
Droogdokkeneiland 8
5026SR Tilburg
The Netherlands

+31 (0)13 545 31 18
info@glue-u.com
WWW.GLUE-U.COM

glue-u

adhesives



ANWENDUNGSHINWEISE

PRE FIX, STANDAARD & MIT EINSÄTZEN

PRE FIX
ANWENDUNGSVIDEO



VIDEO ZUR
STANDARDANWENDUNG



MODIFIKATIONS-
VIDEO




PRE FIX ANWENDUNG

PRÄFIXATIONSMETHODE

Für Pferde, die ihre Hufe aufgrund von Schmerzen nicht hochhalten können. Zum Kleben unter schweren, kalten Bedingungen.



Legen Sie eine mittlere Perle aus Pre Fix CA Glue um die Basis des Hufes.

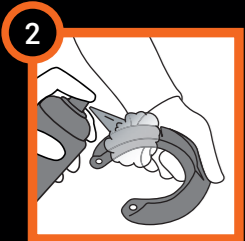

Besprühen Sie die Innenseite des Schuhs mit dem Pre Fix-Aktivator.




Halten Sie die Seitenmanschetten zurück, richten Sie sie entlang des Strahls aus und stellen Sie sie in die richtige Position ein. Halten Sie es 30 Sekunden lang gedrückt. Sobald der Pre Fix CA-Kleber festgesetzt ist, setzen Sie den Huf auf den Boden ab.

PRE FIX AANBRENGEN

PRO PAAR GLUSHU'S


- 1x 150ml Tube Shufit Acrylkleber & Mischspitzen
- 1x Pack Pre Fix Kleber und Aktivator-Spray (hält 6-10 Paare)
- 1x Hufkratzer, um die Manschetten zurückzuziehen
- 1x Spender für Shufit (universell mit Adapter)
- 1x Rolle Hufwickel

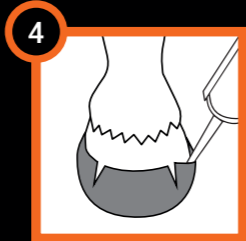

Wenn der Huf auf dem Boden liegt, ziehen Sie die Manschetten mit einem Hufkratzer zurück und füllen Sie sie mit Shufit auf.



Verwenden Sie Hufwickel, um das Hufeisen in Position zu halten, während der Kleber trocknet.

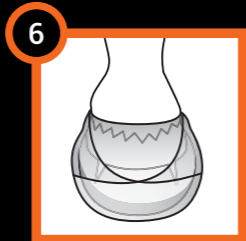

Legen Sie den Huf auf den Boden und lassen Sie ihn mindestens 10 Minuten stehen, bevor Sie den Hufwickel entfernen.

STANDARD AANBRINGEN

PRO PAAR GLUSHU'S

- 1x 150ml Tube Shufit Acrylkleber & Mischspitzen
- 1x Spender für Shufit (universell mit Adapter)
- 1x Rolle Hufwickel



Legen Sie eine mittlere Perle aus Shufit-Kleber um die Innenseite des Hufeisens und der Manschette.



Halten Sie die seitlichen Manschetten zurück, schieben Sie das Eisen auf den Huf, richten Sie es entlang des Strahls aus und stellen Sie ihn in die richtige Position ein.




Verwenden Sie Hufwickel, um das Hufeisen in Position zu halten, während der Kleber trocknet. Halten Sie diese Position mindestens 5 Minuten, bevor Sie den Fuß auf den Boden legen oder bis der Kleber fest geworden ist.

INSERTS AANBRINGEN

PRO PAAR GLUSHU'S

- 1x Set GluShu Einsätze
- 1x Anwendungssatz Ihrer Wahl

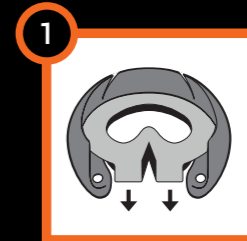

Tragen Sie den Einsatz mit dem Kleber Ihrer Wahl von oben auf den GluShu auf.

Glue-U CA Kleber: 10 Sekunden
Glue-U Shufix: 90 Sekunden

TIP! Füllen Sie das Pad mit Glue-U Pad-Material für die besten Halt.

