



## VOORBEREIDING GLUSHU

De schoen kan opnieuw worden hervormd zoals een normaal aluminium hoefijzer.

*Een goede voorbereiding van de hoef is essentieel om een volledige levensduur van 6-8 weken te garanderen.*

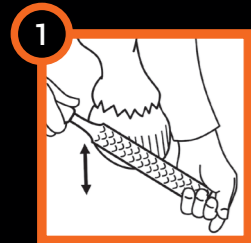

1 Ruw de hoofwand op door neerwaartse bewegingen met de grove kant van de hoefrasp te maken. Vooral bij het achterste gedeelte van de hoef waar minder lijmhechting is.

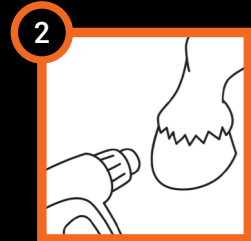


2 Zorg dat de hoeven droog zijn. De meeste mislukte verlijmingen zijn te wijten aan vochtige hoeven.



3 Duw de lijm uit de cartridge totdat deze zwart is voordat hij wordt aangebracht.

Zorg er voor dat de lijm warm is (25 °C - 30 °C).

## VERWIJDEREN DRAWKNIFE

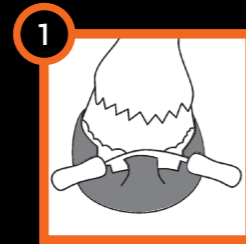

1 Gebruik een drawknife om de zijflappen van de hoef te snijden.



2 Knip het hoefijzer los van de hoef met behulp van een hoefknijptang.



3 Verwijder alle lijmresten of restanten van de Glushu met een hoefrasp of buffer.

PRE FIX  
AANBRENG VIDEO



STANDAARD  
AANBRENG VIDEO



MODIFICATIE  
VIDEO



## GLUSHU PLAKSCHOEN



Een zeer slijtvaste met rubber omringde aluminium hoefijzer dat het paard een lichtgewicht, schokdempend beslag geeft en gemakkelijk toegepast kan worden bij zowel gezonde als beschadigde hoeven.

MEER INNOVATIEVE PRODUCTEN

## CONTACT GLUE-U® ADHESIVES

Glue-U Adhesives BV  
Droogdokkeneiland 8  
5026SR Tilburg  
The Netherlands

+31 (0)13 545 31 18  
info@glue-u.com  
WWW.GLUE-U.COM



# glue-u

adhesives



GEBRUIKERS  
instructie

PRE FIX, STANDAARD & MET INSERTS




## PRE FIX AANBRENGEN

### TIJDELIJKE FIXATIE METHODE

Voor paarden die door kreupelheid, moeilijkheden hebben om hun voet lang omhoog te houden. Voor verlijming in zeer koude omstandigheden.



1 Breng een gemiddelde dosis Pre Fix seconde lijm aan rondom de hoof.

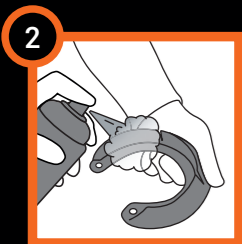

2 Spray Pre Fix activator op de binnenkant van de Glushu.




3 Schuif de schoen voorzichtig op de hoof, plaats hem in lijn met de straal en stel hem in op de juiste positie.

Houd vast voor 30 sec. Zet de hoof terug op de grond wanneer de Pre Fix is uitgehard.

## PRE FIX AANBRENGEN

### PER PAAR GLUSHU'S


- 1x 150ml tube Shufit acryl lijm & mixingtips
- 1x Pre Fix lijm en activator spray (voor 6-10 paar)
- 1x Hoefkrabber voor open trekken cuff
- 1x Pistool voor Shufit (universeel pistool met adapter)
- 1x Rol wikkelfolie

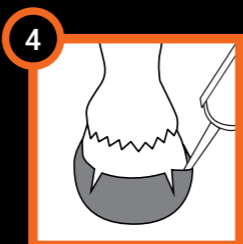

4 Trek met de hoof op de grond de zijflappen terug met een hoefkrabber en vul aan de binnenkant van de flap met Shufit.



5 Gebruik plastic wikkelfolie om de Glushu op zijn plaats te houden en een betere fixatie te creëren.

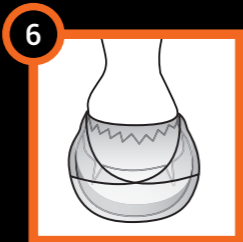

6 Plaats de hoof terug op de grond en laat minstens 10 minuten uitharden, voor het verwijderen van de wikkelfolie.

## STANDAARD AANBRENGEN

### PER PAAR GLUSHU'S

- 1x 150ml tube Shufit acryl lijm & mixingtips
- 1x Pistool voor Shufit (universeel pistool met adapter)
- 1x Rol wikkelfolie



1 Breng een gemiddelde dosis lijm aan in de binnenkant van de Glushu. Breng ook lijm aan op de binnenkant van de zijflappen.



2 Schuif de schoen voorzichtig op de hoof, plaats hem in lijn met de straal en stel hem in op de juiste positie.




3 Gebruik wikkelfolie om de Glushu op zijn plaats te houden en een betere fixatie te creëren.

Plaats de hoof voorzichtig op de grond. De wikkelfolie kan worden verwijderd wanneer de lijm is uitgehard.

## INSERTS AANBRENGEN

### PER PAAR GLUSHU'S

- 1x Set GluShu inserts
- 1x Bevestigingsset naar keuze

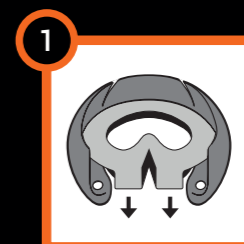

1 Bevestig de insert vanaf boven in de schoen, met de lijm naar keuze.

Glue-U Prefix lijm: 10 seconde  
Glue-U Shufit: 5 minuten

## TIP!

Vul op met een Glue-U opvulmiddel voor de beste ondersteuning.

